



Fortuna SVX-20370-06

Kosmetické křeslo na ošetření obličeje


Vítejte při používání našich elektrických kosmetických lůžek.
Před použitím lůžek si pozorně přečtete tuto příručku uživatele.

1. O této příručce

Tato příručka by se měla používat pouze jako reference pro obsluhu tohoto konkrétního modelu. Pokud se tato příručka použije pro jiné účely, naše společnost nenesе žádné příslušné důsledky a odpovědnost.

Všechny informace v této příručce jsou chráněny autorským právem a nesmí se kopírovat a překládat v žádné části této specifikace bez písemného souhlasu naší společnosti.

2. Upozornění

- Při výměně elektrických komponentů nebo údržbě a čištění přístrojů se musí odpojit napájení.
- Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna, aby se předešlo riziku požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nestoupejte na toto zařízení.
- Nedovolte dětem hrát si se zařízením a neumísťujte ho na místo, kde se ho mohou děti dotýkat. Při odchodu nastavte opěrku zad do nejvyšší polohy.
- Neumisťujte zařízení na vlhká místa, jako je koupelna, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo jiné poruše; Ovladače také držte mimo dosah vody.
- Neumisťujte a nepoužívejte zařízení na místech, kde se maluje/natírá nebo kde se přivádí kyslík.
- Osoby s fyzickými překážkami, poruchami hmatu, duševními poruchami, nedostatkem zkušeností, zdravého rozumu nebo děti nesmějí zařízení používat, pokud nejsou sledovány nebo instruovány personálem, který může být odpovědný za jejich osobní bezpečnost.
- Pokud je zástrčka poškozena, v případě jakéhokoliv nebezpečí kontaktujte distributora, servisní středisko nebo pracovníka s příslušnými dovednostmi a zkušenostmi.
- Během manipulace s lůžky se, prosím, ujistěte, že v místě zdvihu není žádná dostupná věc.
- Operaci by měli provádět vyškolení odborníci.
- Původní návod
-  Pouze pro použití v interiéru.

3. Bezpečnostní opatření

- Toto zařízení by měla používat zkušená osoba, která musí být obeznámena s konstrukcí produktu, výkonem a návodem, a bude provádět pravidelnou údržbu.
- Před instalací, provozem a seřazením si pozorně přečtete tento návod a dobře ho, prosím, uschovejte.
- Tento výrobek se nesmí používat pro jednostranné nebo jednobodové zatížení.
- Dodržujte pravidla bezpečného provozu, produkt nepřetěžujte, a abyste zajistili, že bezpečnostní ochranné vybavení produktu je úplné a spolehlivé, včas eliminuje nebezpečné faktory.
- Pravidelně utahujte šrouby a matice, abyste předešli poruchám způsobeným uvolněním, posouváním, vibracemi a odpadnutím částí.
- Během údržby nesmí obsluha libovolně rozebírat žádné části lůžka.
- Tento produkt není povoleno provozovat, když má poruchu. Pokud se zjistí abnormální jev nebo abnormální zvuk, musí se okamžitě zastavit a zkontrolovat, po odstranění poruchy je možné pokračovat v práci.
- Obsluha musí být obeznámena s preventivními opatřeními popsány v všech částech návodu, aby byla zajištěna bezpečnost osob a produktu.
- Toto kosmetické lůžko je vybaveno třížilovým napájecím kabelem. Napájecí kabel musí být zapojen do třífázové zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna. Není to pouze proto, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, ale také proto, aby mohl produkt správně fungovat.
- Provozujte výrobek přísně v souladu s výstražným štítkem, který je na něm nalepen.
- Během ovládání zvedání musí být tlačítko stisknuto nepřetržitě, dokud se lůžko nedostane do vhodné polohy.
- Věnujte, prosím, pozornost tomu, že nepřetržitá pracovní doba by měla být max. 2 min. ZAPNUTO a 18 min. VYPNUTO, při provozu motoru.
- Údržbu by měli provádět vyškolení odborníci.
- Po každém ošetření použijte pouze neutrální roztok k odstranění prachu, skvrn na kůži nebo na dřevěných částech.
- Při nastavování opěradla, sedadla, opěrky nohou nebo zvedání celé postele ručním ovladačem nebo instalovaným nožním ovladačem držte ruce, nohy a hlavu mimo tuto polohu.
(Prohlédněte si, prosím, obrázek vpravo)




4. Rozsah použití

Tato elektrická kosmetická lůžka jsou vhodná pro kosmetické, masážní a manikúrní ošetření.

5. Instalace

1. Lůžko umístěte na vhodné místo podle celkového uspořádání, denního nebo umělého osvětlení a provozních podmínek salónu nebo domácnosti a uchovávejte ho v čistém, suchém a chladném prostředí.
2. Otevřete krabici, abyste zkontrolovali, zda je výrobek neporušený a zda je příslušenství nebo náhradní díly kompletní. Pokud se vyskytne nějaký problém, kontaktujte, prosím, distributora nebo nás.
3. Instalace
Umístěte lůžko do správné polohy. Všimněte si, prosím, že pro upevnění lůžka není potřeba instalovat na podlahu další šrouby, protože původní design zohledňuje stabilitu. Ujistěte se však, že je lůžko umístěno na pevném a rovném podkladu, aby se předešlo jakékoliv nehodě. Pokud se lůžko otáčí nebo naklání v důsledku nerovného povrchu, nastavte čtyři kusy gumových nožiček (M10x30) a matice (M10) upevněte na rám šestihranným vidlicovým klíčem tak, aby bylo lůžko stabilní.
4. Správně připojte zástrčku produktu ke zdroji napájení. (Podrobnosti uvedeny níže)

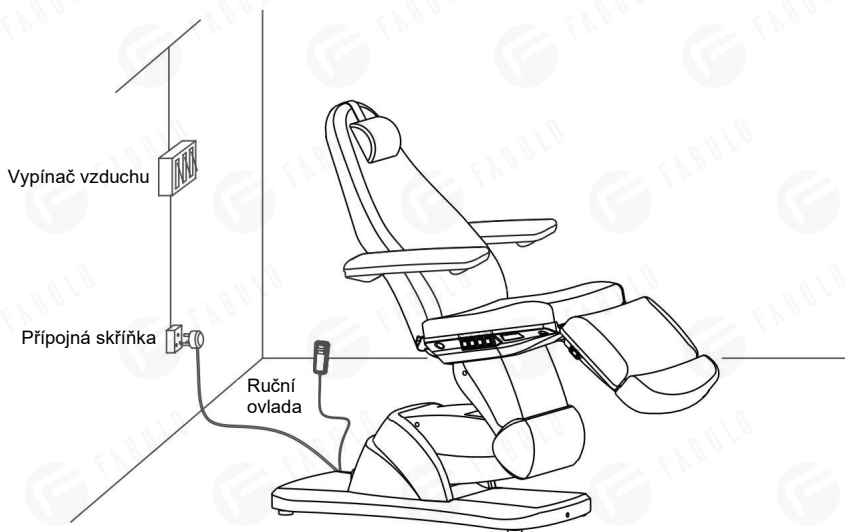

6. Konstrukce elektrické kosmetické postele

- Toto kosmetické lůžko se skládá z ovládací skříňky, motoru, hardwaru, plastových dílů a kůže. Mezi nimi ovládací skříňka řídí činnost motorů a ručního ovladače.
- Toto kosmetické lůžko má nastavení úhlu opěradla, sedadla, opěrky nohou a nastavení zdvihu celé postele, což je celková a integrální konstrukce.
(Podrobnosti uvedeny níže)





- ① nastavení úhlu opěradla
- ② nastavení zdvihu celé postele
- ③ nastavení úhlu sedadla
- ④ nastavení úhlu opěrky nohou (manuální nastavení)

7. Návod k použití

SVX-20370-06


Standardní konfigurace (Panel tlačítek)

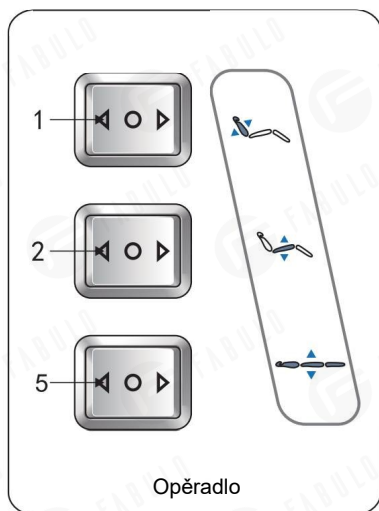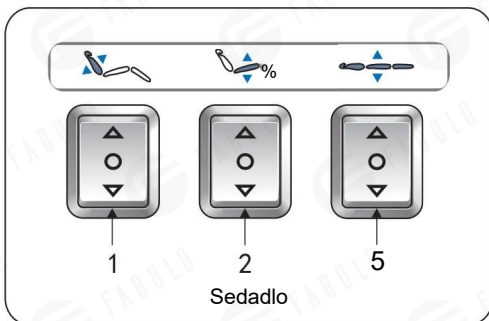


Č.	Popis	Činnost
1	Tlačítko pro nastavení opěrky zad	Stiskněte tlačítko nahoru (dolů), opěradlo se posouvá nahoru (dolů), úhel se zvětšuje (zmenšuje) konstantní rychlostí.
2	Tlačítko pro nastavení sedadla	Stiskněte tlačítko nahoru (dolů), sedadlo se naklání dozadu (zpět do horizontální polohy).
3	Tlačítko pro nastavení opěrky nohou	Stiskněte tlačítko nahoru (dolů), opěrka nohou se posouvá nahoru (dolů), úhel se zmenšuje (zvětšuje) konstantní rychlostí.
4	Tlačítko pro nastavení opěrky nohou (vlevo)	Stiskněte tlačítko nahoru (dolů), opěrka nohou se posouvá nahoru (dolů), úhel se zmenšuje (zvětšuje) konstantní rychlostí.
5	Tlačítko pro ovládání výšky	Stiskněte tlačítko nahoru (dolů), opěradlo se posouvá nahoru (dolů), úhel se zvětšuje (zmenšuje) konstantní rychlostí.

SVX-20370-06


1. Volitelná konfigurace
(Ruční ovladač)

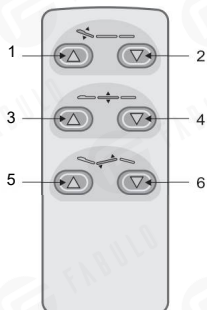

2. Volitelná konfigurace
(Ruční ovladač)

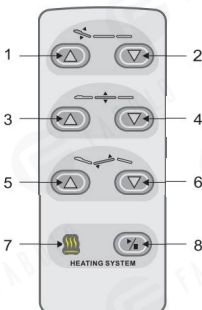

3. Volitelná konfigurace
(Nožní ovladač)


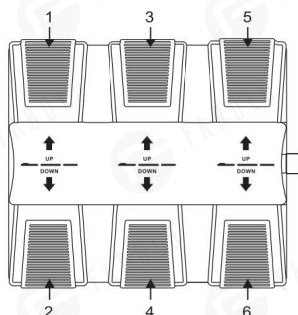


Č.	Popis	Činnost
1	Opěradlo se posouvá nahoru	Opěradlo se plynule zvedá stisknutím tlačítka.
2	Opěradlo se posouvá dolů	Opěradlo se plynule spouští stisknutím tlačítka.
3	Celá postel se posouvá nahoru	Lůžko se plynule zvedá stisknutím tlačítka.
4	Celá postel se posouvá dolů	Lůžko se plynule spouští stisknutím tlačítka.
5	Sedadlo nahoru	Stisknutím tlačítka se sedadlo plynule naklání.
6	Sedadlo dolů	Stisknutím tlačítka se sedadlo plynule vyrovnává.
7	Kontrolka funkce ohřevu (Volitelné)	Stisknutím tlačítka se kontrolka rozsvítí, funkce ohřevu funguje; opětovným stisknutím tlačítka kontrolka zhasne, funkce ohřevu se vypne.
8	Ohřev (Volitelné)	

8. Technické parametry

Napájení	AC 100-120V nebo AC 220-240V nebo AC 100-240V,50/60Hz
Maximální výkon	300W
Teplota prostředí	0°C~+40°C
Relativní vlhkost	30%~90%
Jmenovité zatížení zvedání	175kg
Rozměry balení	1720x620x720mm
Čistá hmotnost	88kg
Celková hmotnost	105kg

SVX-20370-06

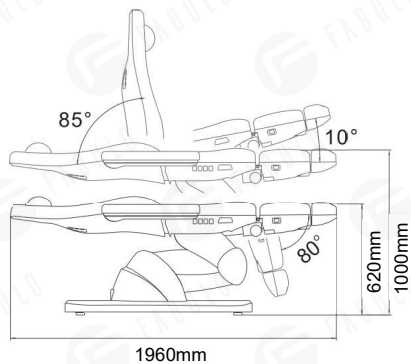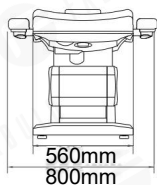

9. Údržba

1. Po každém ošetření, prosím, použijte pouze neutrální roztok k odstranění prachu, skvrn na kůži nebo na plastovém krytu. Tím se zabrání předčasnému stárnutí kůže a plastového krytu. Po každém ošetření, prosím, použijte k čištění kůže pouze neutrální roztok. Dezinfekční roztoky jako alkohol, kyselina nebo alkalické roztoky jsou zakázány.
2. Pravidelně (jednou ročně) namažte pohyblivé části.

10. Schéma zapojení obvodů systému



12. Řešení problémů

Jak se projevuje porucha	Příčina	Řešení
Nelze normálně pohybovat nahoru ani dolů	1. Napájecí kabel je odpojen nebo není dobře zapojen.	1. Připojte napájecí kabel nebo ho dobře zapojte.
	2. Špatná kvalita ručního ovladače nebo nožního ovladače.	2. Vyměňte ruční ovladač nebo nožní ovladač.
	3. Nízká kvalita panelu s tlačítky.	3. Ohledně řešení problémů se obraťte na středisko údržby nebo dodavatele.
	4. Nízká kvalita ovládací skříňky.	
	5. Roztržení zadní části motoru.	
	6. Motor je poškozen.	
Chyba audio systému	1. Chyba připojení vstupu/výstupu.	1. Dvakrát zkontrolujte připojení vstupu/výstupu.
	2. Chyba ovládací skříňky zvuku.	2. Vyměňte vadné díly.
	3. Nízká kvalita zvukového reproduktoru.	3. Pokud problém stále není vyřešen, obraťte se na servisní středisko nebo dodavatele ohledně řešení problému.
Abnormální zvuk	1. V rotujících částech chybí mazací olej.	1. Přidejte mazací olej.
	2. V rotačních polohách (jako jsou závěsy soupravy POM) je nedostatek oleje.	2. Přidejte mazací olej.
	3. Problémy s kvalitou motoru.	3. Vyměňte motor.

Pokud se problém nevyřeší ani po výše uvedených operacích, obraťte se na středisko údržby nebo dodavatele, aby ho vyřešili.



Nevyhazujte stará nebo vadná zařízení do domácího odpadu; mělo by se to dělat pouze prostřednictvím veřejných sběrných míst.

▲ Před použitím zkontrolujte specifikaci produktu. Tato příručka slouží pouze jako reference. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.