



Gaia SVX-20371-06


Pedikérské křeslo

Vítejte při používání našich produktů.
Před použitím produktů si pozorně přečtěte tuto příručku uživatele.

1. O této příručce


Tato příručka by se měla používat pouze jako reference pro obsluhu tohoto konkrétního modelu. Pokud se tato příručka použije pro jiné účely, naše společnost nenesе žádné příslušné následky a odpovědnost. Všechny informace v této příručce jsou chráněny autorským právem a nesmí se kopírovat a překládat v žádné části této specifikace bez písemného souhlasu naší společnosti.

2. Upozornění

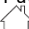- Při výměně elektrických komponentů nebo údržbě a čištění přístrojů se musí odpojit napájení.
- Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna, aby se předešlo riziku požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nestoupejte na toto zařízení.
- Nedovolte dětem hrát si se zařízením a neumistujte ho na místo, kde se ho mohou děti dotýkat. Při odchodu nastavte opěrku zad do nejvyšší polohy.
- Neumistujte zařízení na vlhká místa, jako je koupelna, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo jiné poruše; Ovladače také držte mimo dosah vody.
- Neumistujte a nepoužívejte zařízení na místech, kde se maluje/natírá nebo kde se přivádí kyslík.
- Osoby s fyzickými překážkami, poruchami hmatu, duševními poruchami, nedostatkem zkušeností, zdravého rozumu nebo děti nesmí zařízení používat, pokud nejsou sledovány nebo instruovány personálem, který může být odpovědný za jejich osobní bezpečnost.
- Pokud je zástrčka poškozena, v případě jakéhokoliv nebezpečí kontaktujte distributora, servisní středisko nebo pracovníka s příslušnými dovednostmi a zkušenostmi.
- Během manipulace s lůžkem se, prosím, ujistěte, že v místě zdvihu není žádná dostupná věc.
- Operaci by měli provádět vyškolení odborníci.
- Původní návod
-  Pouze pro použití v interiéru.


3. Bezpečnostní opatření

- Tento produkt by měla používat zkušená osoba, která musí být obeznámena s konstrukcí produktu, výkonem a návodem, a bude provádět pravidelnou údržbu.
- Před instalací, provozem a seřizením si pozorně přečtete tento návod a dobře ho, prosím, uschovejte.
- Tento výrobek se nesmí používat pro jednostranné nebo jednobodové zatížení.
- Dodržujte pravidla bezpečnostního provozu, produkt se nesmí přetěžovat a aby se zajistilo, že bezpečnostní ochranné vybavení produktu je úplné a spolehlivé, včas eliminuje nebezpečné faktory.
- Pravidelně utahujte šrouby a matice, abyste předešli poruchám způsobeným uvolněním, posouváním, vibracemi a odpadnutím.
- Během údržby nesmí obsluha libovolně rozebírat žádné části lůžka.
- Tento produkt není povoleno provozovat, když má poruchu. Pokud se zjistí abnormální jev nebo abnormální zvuk, musí se okamžitě zastavit a zkontrolovat, po odstranění poruchy je možné pokračovat v práci.
- Obsluha musí být obeznámena s preventivními opatřeními popsányými ve všech částech návodu, aby byla zajištěna bezpečnost osob a produktu.
- Tento produkt je vybaven třížilovým napájecím kabelem. Napájecí kabel musí být zapojen do třífázové zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna. Není to pouze proto, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, ale také proto, aby produkt mohl správně fungovat.
- Provozujte výrobek přísně v souladu s výstražným štítkem, který je na něm nalepen.
- Během ovládání zvedání musí být tlačítko nepřetržitě stisknuto, dokud se produkt nedostane do vhodné polohy.
- Věnujte, prosím, pozornost tomu, že nepřetržitá pracovní doba by měla být max. 2 min. ZAPNUTO a 18 min. VYPNUTO, při provozu motoru.
- Údržbu by měli provádět vyškolení odborníci.
- Po každém ošetření použijte k odstranění prachu nebo skvrn z produktu pouze neutrální roztok.
- Při nastavování každé části držte ruce, nohy a hlavu mimo polohu označenou šipkou.
(Jako je znázorněno na fotografii)

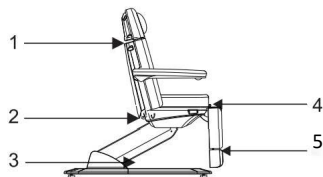


4. Instalace

1. Výrobek umístíte na vhodné místo podle celkového uspořádání, denního nebo umělého osvětlení a provozního stavu salónu nebo domácnosti a uchovávejte ho v čistém, suchém a chladném prostředí.
2. Otevřete krabici a zkontrolujte, zda je výrobek neporušený a zda je příslušenství nebo náhradní díly kompletní. Pokud se vyskytne nějaký problém, kontaktujte, prosím, distributora nebo nás.
3. Instalace
Umístíte výrobek do správné polohy. Upozorňujeme, že k upevnění lůžka není potřeba instalovat na podlahu další šrouby, protože původní design zohlednil stabilitu.
Ujistěte se však, prosím, že je výrobek umístěn na pevném a rovném podkladu, aby se předešlo jakékoliv nehodě. Pokud se výrobek otáčí nebo naklání v důsledku drsné podlahy, nastavte čtyři kusy plastových nožiček (M10x30) a matic (M10) šestihranným vidlicovým klíčem, které jsou upevněny na spodním panelu tak, aby byl produkt stabilní.
4. Napájení
Napájení je 100V-120V nebo 220-240V, 50/60Hz, střídavý proud (AC).
5. Správně připojte zástrčku produktu ke zdroji napájení. (Jako je znázorněno na fotografii)

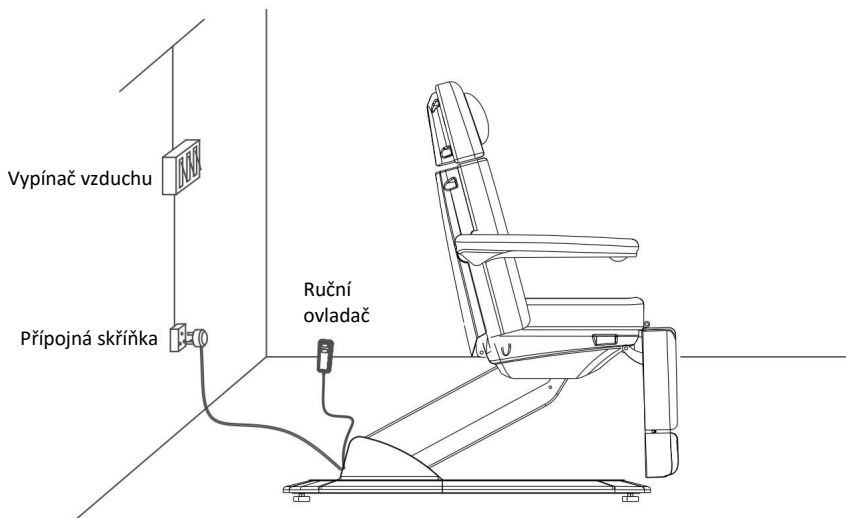

5. Konstrukce produktu


- Toto kosmetické lůžko se skládá z ovládací skříňky, motoru, hardwaru, plastových dílů a kůže. Mezi nimi ovládací skříňka řídí činnost motorů a ručního ovladače.
- Tento produkt má nastavení úhlu opěradla, nastavení úhlu sedadla a nastavení zdvihu, což je celková a integrální konstrukce.
(Jako je znázorněno na fotografii)

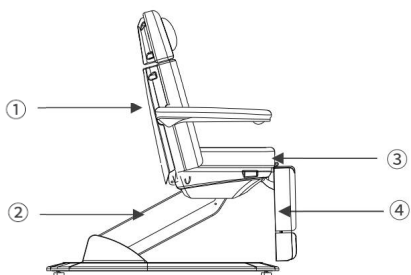


- ① nastavení úhlu opěradla
- ② nastavení zdvíhu celého lůžka
- ③ nastavení úhlu sklonu sedadla
- ④ nastavení úhlu opěrky nohou (manuální nastavení)

6. Návod k použití

1. Standardní konfigurace (Ruční ovladač)

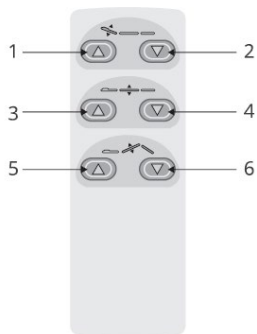


2. Volitelná konfigurace (Nožní ovladač)

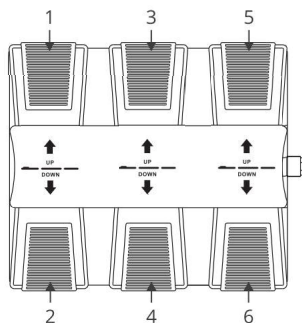

Č.	Popis	Činnost
1	Opěradlo se posouvá nahoru	Opěradlo se plynule zvedá stisknutím tlačítka.
2	Opěradlo se posouvá dolů	Opěradlo se plynule spouští stisknutím tlačítka.
3	Celá postel se posouvá nahoru	Lůžko se plynule zvedá stisknutím tlačítka.
4	Celá postel se posouvá dolů	Lůžko se plynule spouští stisknutím tlačítka.
5	Sedadlo nahoru	Stisknutím tlačítka se sedadlo plynule naklání.
6	Sedadlo dolů	Stisknutím tlačítka se sedadlo plynule vyrovnává.

7. Upozornění pro provoz




- Není dovoleno naklánět sedadlo, když je postel v nejnižší poloze.

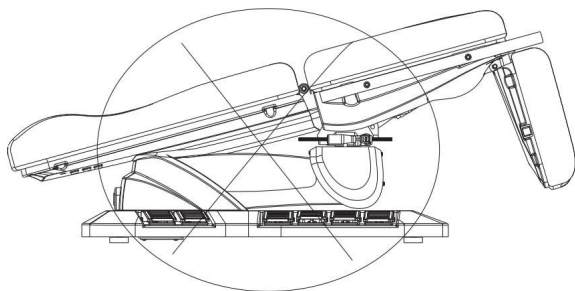

Tento obrázek produktu slouží pouze k zobrazení, konkrétní konstrukci produktu zjistíte u skutečného produktu.

8. Technické parametry


Napájení	AC 100-120V nebo AC 220-240V nebo AC 100-240V,50/60HZ
Maximální výkon	300W
Teplota prostředí	0°C~+40°C
Relativní vlhkost	30%~90%
Jmenovité zatížení zvedání	175kg
Rozměry balení	1280x690x690mm
Čistá hmotnost	64kg
Celková hmotnost	77kg

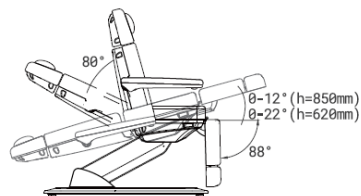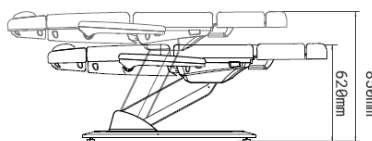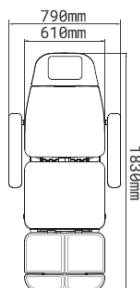

9. Údržba

- Po každém ošetření použijte pouze neutrální roztok k odstranění prachu, skvrn na kůži, kovových částech nebo jiných částech. Dezinfekční roztoky jako alkohol, kyseliny nebo alkalické roztoky jsou zakázány. Je to proto, aby se předešlo zkrácení životnosti komponentů.
- Pravidelně (jednou ročně) namažte pohyblivé části.

10. Schéma zapojení obvodů systému

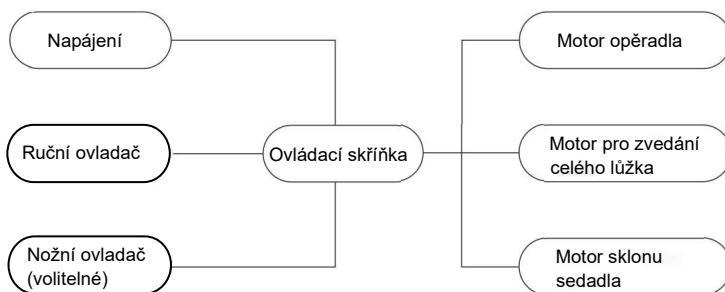

11. Řešení problémů

Jak se projevuje porucha	Příčina	Řešení
Motor nefunguje normálně	1. Napájecí kabel je odpojen nebo není dobře zapojen.	1. Připojte napájecí kabel nebo ho dobře zapojte.
	2. Špatná kvalita ručního ovladače nebo nožního ovladače.	2. Vyměňte ruční ovladač nebo nožní ovladač.
	3. Nízká kvalita ovládací skříňky.	3. Ohledně řešení problémů se obraťte na středisko údržby nebo dodavatele.
	4. Roztržení zadní části motoru.	
	5. Motor je poškozen.	
Abnormální zvuk	1. V rotujících částech chybí mazací olej.	1. Přidejte mazací olej.
	2. V rotačních polohách (jako jsou závěsy, soupravy POM, plynový zdvih) je nedostatek mazacího oleje.	2. Přidejte mazací olej.
	3. Problémy s kvalitou motoru.	3. Vyměňte motor.

Pokud se problém nevyřeší ani po výše uvedených operacích, obraťte se na středisko údržby nebo dodavatele, aby ho vyřešili.



Nevyhazujte stará nebo vadná zařízení do domácího odpadu; mělo by se to dělat pouze prostřednictvím veřejných sběrných míst.

▲ Před použitím zkontrolujte specifikaci produktu. Tato příručka slouží pouze jako reference. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.