



Geo SVX-20369-06


Kosmetické křeslo na ošetření obličeje

Vítejte při používání našeho elektrického kosmetického křesla na ošetření obličeje.
Před použitím lůžka si pozorně přečtěte tuto příručku uživatele.

1. O této příručce

Tato příručka by se měla používat pouze jako reference pro obsluhu tohoto konkrétního modelu. Pokud se tato příručka použije pro jiné účely, naše společnost neponese žádné příslušné následky a odpovědnost. Všechny informace v této příručce jsou chráněny autorským právem a nesmí se kopírovat a překládat v žádné části této specifikace bez písemného souhlasu naší společnosti.

2. Upozornění

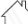- Při výměně elektrických komponentů nebo údržbě a čištění přístrojů se musí odpojit napájení.
- Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna, aby se předešlo riziku požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nestoupejte na toto zařízení.
- Nedovolte dětem hrát si se zařízením a neumísťujte ho na místo, kde se ho mohou děti dotýkat. Při odchodu nastavte opěrku zad do nejvyšší polohy.
- Neumísťujte zařízení na vlhká místa, jako je koupelna, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo jiné poruše; Ovladače také držte mimo dosah vody.
- Neumísťujte a nepoužívejte zařízení na místech, kde se maluje/natírá nebo kde se přivádí kyslík.
- Osoby s fyzickými překážkami, poruchami hmatu, duševními poruchami, nedostatkem zkušeností, zdravého uvažování nebo děti nesmí zařízení používat, pokud nejsou sledovány nebo instruovány personálem, který může být odpovědný za jejich osobní bezpečnost.
- Pokud je zástrčka poškozena, v případě jakéhokoliv nebezpečí kontaktujte distributora, servisní středisko nebo pracovníka s příslušnými dovednostmi a zkušenostmi.
- Během manipulace s lůžky se, prosím, ujistěte, že v místě zdvihu není žádná dostupná věc.
- Operaci by měli provádět vyškolení odborníci.
- Původní návod
-  Pouze pro použití v interiéru

3. Bezpečnostní opatření

- Toto zařízení by měla používat zkušená osoba, která musí být obeznámena s konstrukcí produktu, výkonem a návodem, a bude provádět pravidelnou údržbu.
- Před instalací, provozem a seřizením si pozorně přečtěte tento návod a dobře ho, prosím, uschovejte.
- Tento výrobek se nesmí používat pro jednostranné nebo jednobodové zatížení.
- Dodržujte pravidla bezpečného provozu, produkt nepřetěžujte, a abyste zajistili, že bezpečnostní ochranné vybavení produktu je úplné a spolehlivé, včas eliminuje nebezpečné faktory.
- Pravidelně utahujte šrouby a matice, abyste předešli poruchám způsobeným uvolněním, posouváním, vibracemi a odpadnutím částí.
- Během údržby nesmí obsluha libovolně rozebírat žádné části lůžka.
- Tento produkt není povoleno provozovat, když má poruchu. Pokud se zjistí abnormální jev nebo abnormální zvuk, musí se okamžitě zastavit a zkontrolovat, po odstranění poruchy je možné pokračovat v práci.
- Obsluha musí být obeznámena s preventivními opatřeními popsány ve všech částech návodu, aby byla zajištěna bezpečnost osob a produktu.
- Toto kosmetické lůžko je vybaveno třížilovým napájecím kabelem. Napájecí kabel musí být zapojen do třížilové zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna. Není to pouze proto, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, ale také proto, aby mohl produkt správně fungovat.
- Provozujte výrobek přísně v souladu s výstražným štítkem, který je na něm nalepen.
- Během ovládání zvedání musí být tlačítko stisknuto nepřetržitě, dokud se lůžko nedostane do vhodné polohy.
- Věnujte, prosím, pozornost tomu, že nepřetržitá pracovní doba by měla být max. 2 min. ZAPNUTO a 18 min. VYPNUTO, při provozu motoru.
- Údržbu by měli provádět vyškolení odborníci.
- Po každém ošetření použijte pouze neutrální roztok k odstranění prachu, skvrn na kůži nebo na dřevěných částech.
- Při nastavování opěradla, sedadla, opěrky nohou nebo zvedání celé postele ručním ovladačem nebo instalovaným nožním ovladačem držte ruce, nohy a hlavu mimo tuto polohu.
(Prohlédněte si, prosím, obrázek vpravo)



4. Rozsah použití

Tato elektrická kosmetická lůžka jsou vhodná pro kosmetické, masážní a manikúrní ošetření.

5. Instalace

1. Lůžko umístěte na vhodné místo podle celkového uspořádání, denního nebo umělého osvětlení a provozních podmínek salónu nebo domácnosti a uchovávejte ho v čistém, suchém a chladném prostředí.
2. Otevřete krabici, abyste zkontrolovali, zda je výrobek neporušený a zda je příslušenství nebo náhradní díly kompletní. Pokud se vyskytne nějaký problém, kontaktujte, prosím, distributora nebo nás.

3. Instalace


Umístěte lůžko do správné polohy. Všimněte si, prosím, že pro upevnění lůžka není potřeba instalovat na podlahu další šrouby, protože původní design zohledňuje stabilitu. Ujistěte se však, že je lůžko umístěno na pevném a rovném podkladu, aby se předešlo jakékoliv nehodě. Pokud se lůžko otáčí nebo naklání v důsledku nerovného povrchu, nastavte čtyři kusy gumových nožiček (M10x30) a matice (M10) upevněte na rám šestihřanným vidlicovým klíčem tak, aby bylo lůžko stabilní.

4. Napájení a připojení ovladačů:


Připojte napájecí zdroj, ruční ovladač a nožní ovladač k lůžku. Vstupní napětí a frekvence musí být 110-120V/60Hz nebo 220-240V/50Hz.

Vstupní porty: VSTUP (pro napájení), RUCNÍ OVLADAČ, NOŽNÍ OVLADAČ.

(Podrobnosti jako na obrázku vpravo)

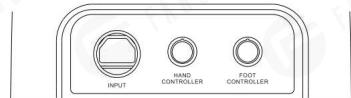


5. Správně připojte zástrčku lůžka ke zdroji napájení. (Podrobnosti uvedeny níže)

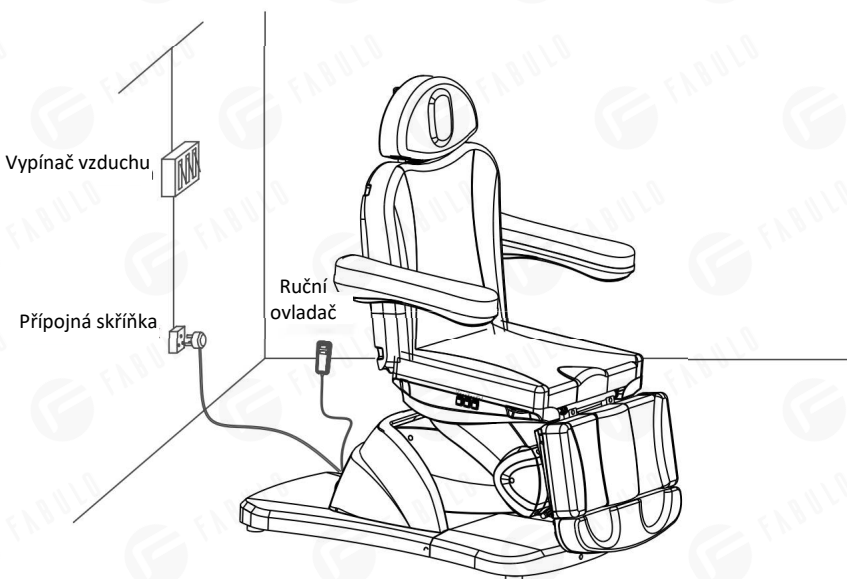

6. Konstrukce elektrického kosmetického lůžka

- Toto kosmetické lůžko se skládá z ovládací skříňky, motoru, hardwaru, plastových dílů a kůže. Mezi nimi ovládací skříňka řídí činnost motorů a ručního ovladače.
- Toto kosmetické lůžko má nastavení úhlu opěradla, sedadla, opěrky nohou a nastavení zdvihu celé postele, což je celková a integrální konstrukce.
(Podrobnosti uvedeny níže)

SVX-20369-06


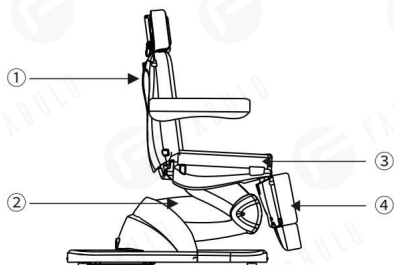


- ① nastavení úhlu opěradla
- ② nastavení zdvihu celého lůžka
- ③ nastavení úhlu sedadla
- ④ nastavení úhlu opěrky nohou (manuální nastavení)

7. Návod k použití

SVX-20369-06


Standardní konfigurace (Panel tlačítek)

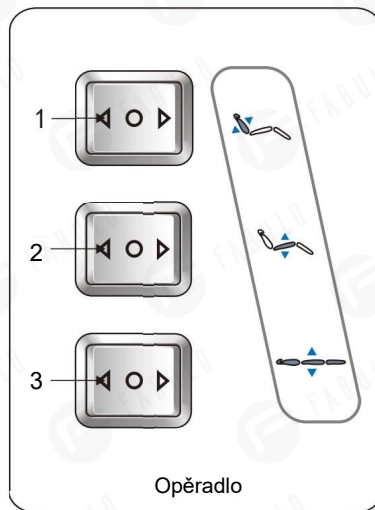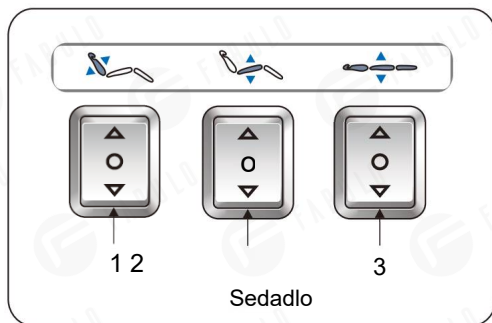


| Č. | Popis | Činnost |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Tlačítko pro nastavení opěradla | Stiskněte tlačítko nahoru (dolů), opěradlo se posune nahoru (dolů), úhel se zvětšuje (zmenšuje) konstantní rychlostí. |
| 2 | Tlačítko pro nastavení sedadla | Stiskněte tlačítko nahoru (dolů), sedadlo se nakloní dozadu (zpět do horizontální polohy). |
| 3 | Tlačítko pro ovládání výšky | Stiskněte tlačítko nahoru (dolů), opěradlo se posune nahoru (dolů), úhel se zvětšuje (zmenšuje) konstantní rychlostí. |

SVX-20369-06


1. Volitelná konfigurace (Ruční ovladač)

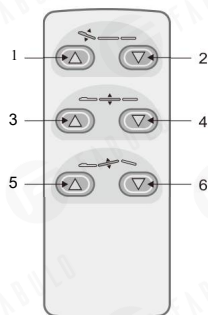

2. Volitelná konfigurace (Ruční ovladač)

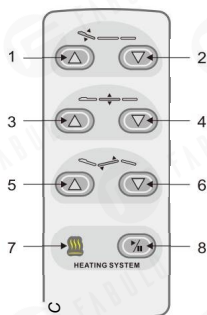

3. Volitelná konfigurace (Nožní ovladač)

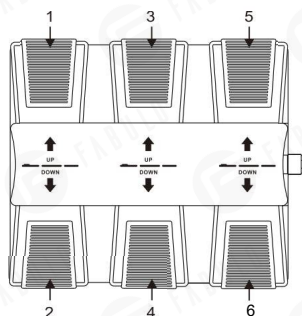


| Č. | Popis | Činnost |
|----|--|---|
| 1 | Opěradlo se posouvá nahoru | Opěradlo se plynule zvedá stisknutím tlačítka. |
| 2 | Opěradlo se posouvá dolů | Opěradlo se plynule spouští stisknutím tlačítka. |
| 3 | Celá postel se posouvá nahoru | Lůžko se plynule zvedá stisknutím tlačítka. |
| 4 | Celá postel se posouvá dolů | Lůžko se plynule spouští stisknutím tlačítka. |
| 5 | Sedadlo nahoru | Stisknutím tlačítka se sedadlo plynule naklání. |
| 6 | Sedadlo dolů | Stisknutím tlačítka se sedadlo plynule vyrovnává. |
| 7 | Kontrolka funkce ohřevu (Volitelné) | Stisknutím tlačítka se světlo rozsvítí, funkce ohřevu funguje; opětovným stisknutím tlačítka světlo zhasne, funkce ohřevu se vypne. |
| 8 | Ohřev (Volitelné) | |

Poznámky:

- Nastavení paměti polohy je dostupné pouze pro modely s paměťovou funkcí.
- Funkce ohřevu je dostupná pouze pro modely s funkcí ohřevu.
- Různé ruční ovladače by měly být vybrány podle různých konfigurací.

8. Upozornění k provozu

- Pokud zjistíte, že se podpěrná tyč opěrky hlavy uvolnila, opravte ji podle těchto kroků.

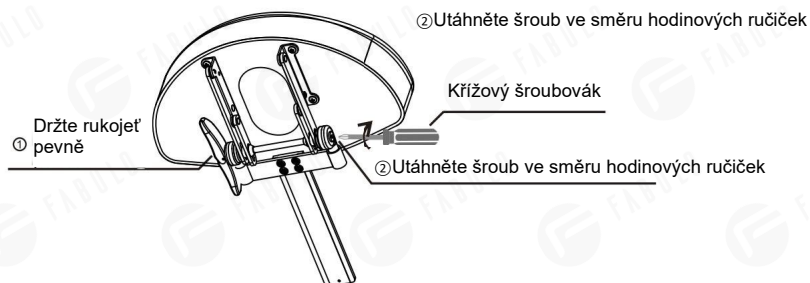


Tento obrázek produktu slouží pouze k zobrazení, konkrétní konstrukci produktu najdete ve skutečném produktu.

9. Technické parametry

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Napájení | AC 100-240V, 50/60HZ |
| Maximální výkon | 300W |
| Teplota prostředí | 0°C~+40°C |
| Relativní vlhkost | 30%~90% |
| Jmenovité zatížení zvedání | 175kg |
| Rozměry balení | 1470x660x720mm |
| Čistá hmotnost | 83kg |
| Celková hmotnost | 98kg |


SVX-20369-06

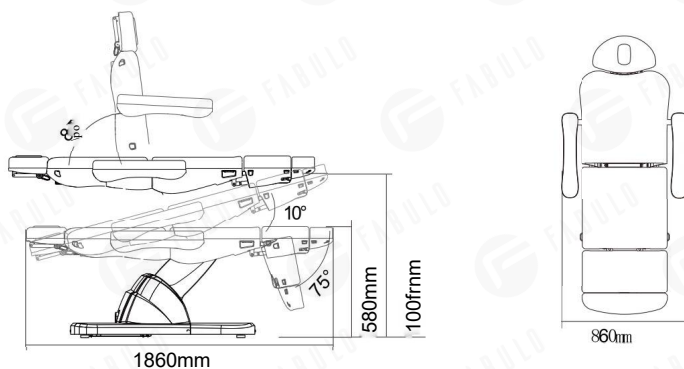

10. Údržba

1. Po každém ošetření použijte pouze neutrální roztok k odstranění prachu, skvrn na kůži, kovových částech nebo plastovém krytu. Dezinfekční roztoky jako alkohol, kyseliny nebo alkalické roztoky jsou zakázány. Tím se zabrání zkrácení životnosti kůže a plastového krytu.
2. Pravidelně (jednou ročně) mažte pohyblivé části.

11. Schéma zapojení obvodů systému

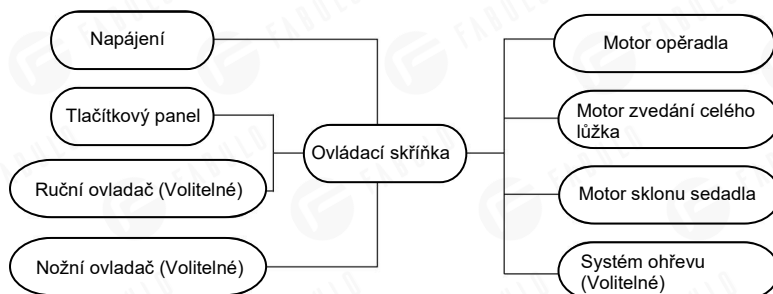

12. Řešení problémů

| Jak se projevuje porucha | Příčina | Řešení |
|--|--|--|
| Nelze normálně pohybovat nahoru ani dolů | 1. Napájecí kabel je odpojen nebo není dobře zapojen. | 1. Připojte napájecí kabel nebo ho dobře zapojte. |
| | 2. Špatná kvalita ručního ovladače nebo nožního ovladače. | 2. Vyměňte ruční ovladač nebo nožní ovladač. |
| | 3. Nízká kvalita kolébkového spínače. | 3. Ohledně řešení problémů se obraťte na středisko údržby nebo dodavatele. |
| | 4. Nízká kvalita ovládací skříňky. | |
| | 5. Roztržení zadní části motoru. | |
| | 6. Motor je poškozen. | |
| Abnormální zvuk | 1. V rotujících částech chybí mazací olej. | 1. Přidejte mazací olej. |
| | 2. V rotačních polohách (jako jsou závěsy, soupravy POM) je nedostatek mazacího oleje. | 2. Přidejte mazací olej. |
| | 3. Problémy s kvalitou motoru. | 3. Vyměňte motor. |

Pokud se problém nevyřeší ani po výše uvedených operacích, obraťte se na středisko údržby nebo dodavatele, aby ho vyřešili.



Nevyhazujte stará nebo vadná zařízení do domácího odpadu; mělo by se to dělat pouze prostřednictvím veřejných sběrných míst.

▲ Před použitím zkontrolujte specifikaci produktu. Tato příručka slouží pouze jako reference. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.