



SVX-20373-06

SVX-20374-06

Kosmetický přístroj

Uživatelská příručka

F-362 / F-364

Vítejte při používání našich produktů.

Před použitím produktů si pozorně přečtěte návod k použití.

Naše společnost si vyhrazuje právo zlepšovat design a upravovat produkty bez předchozího upozornění.

## Obsah



O této příručce .....	1
Upozornění .....	1
Parametry produktu a seznámení se s F-362 .....	2/3
Parametry produktu a seznámení se s F-363 .....	4/5
Parametry produktu a seznámení se s F-364 .....	6/7
Parametry produktu a seznámení se s F-365 .....	8/9
Seznámení se s horkým a studeným kladivem .....	10/11
Seznámení se s ultrazvukovou sondou .....	12/13
Seznámení se se Skin Scrubberem .....	14/15
Seznámení se s radiofrekvencí .....	16/17
Seznámení se s diamantovou dermabrazí .....	18/19
Seznámení se s vakuem/rozprašovačem .....	20/21
Seznámení se s vysokofrekvenční elektroterapií .....	22/23
Seznámení se s rotačním kartáčem .....	24/25
Seznámení se s elektroléčbou .....	26/27
Preventivní opatření týkající se provozu RES a CAP .....	28
Seznámení se s RES .....	29
Seznámení se s CAP .....	30
Nouzová opatření a řešení problémů .....	31

## O této příručce

Tato příručka by se měla používat pouze jako reference pro obsluhu tohoto konkrétního modelu. Pokud se tato příručka použije pro jiné účely, naše společnost nenese žádné příslušné důsledky a odpovědnost. Všechny informace v této příručce jsou chráněny autorským právem a nesmí se kopírovat a překládat v žádné části této specifikace bez písemného souhlasu naší společnosti.

## Bezpečnostní pokyny

Pro zajištění správného a bezpečného používání tohoto produktu si před použitím přečtěte všechny pokyny! Dodržujte, prosím, všechna bezpečnostní opatření!

	<b>Upozornění!</b>	<p><b>Označuje potenciální nebezpečnou situaci, pokud se jí nevyhnete, může vést k vážným ztrátám na životech.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tento produkt je určen pouze pro kosmetické praktiky s odbornou kvalifikací.</li><li>• Výrobek nepoužívejte ani neskladujte na vlhkém místě, jako je koupelna, abyste předešli poruše a nebezpečí.</li><li>• Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti hořlavých předmětů (např. alkohol, ředidlo, benzín, odstraňovač laku na nehty, spreje atd.).</li><li>• Tento produkt nepoužívejte za následujících podmínek: když je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena nebo se zahřívá; když se zástrčka v zásuvce uvolní.</li><li>• Nepoužívejte mokré ruce k zapojování a odpojování konektorů napájecího kabelu a při používání tohoto produktu.</li><li>• Ujistěte se, že pracovní napětí tohoto produktu odpovídá jeho jmenovitému napětí.</li><li>• Před použitím se ujistěte, že zástrčka a konektor napájecího kabelu jsou zcela zasunuty, aby nedošlo k nebezpečí.</li><li>• Když tento produkt nepoužíváte, vypněte napájení a vytáhněte zástrčku.</li><li>• Pravidelně čistěte prach nahromaděný na zástrčce a konektoru napájecího kabelu, abyste předešli selhání izolace způsobenému vlhkostí, prachem a jinými faktory.</li><li>• Ujistěte se, že pro tento produkt používáte určenou sadu napájecích kabelů. Tuto sadu napájecích kabelů nepoužívejte na žádném jiném zařízení.</li><li>• Neomotávejte napájecí kabel kolem produktu, jinak se může napájecí kabel zdeformovat a pokazit.</li><li>• Uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte dětem používat tento produkt.</li><li>• Neupravujte, nerozebírejte ani neopravujte tento produkt svépomocí. Pokud ho potřebujete opravit, obraťte se na výrobce, jeho zástupce nebo profesionální pracovníky údržby, aby ho zkontrolovali a opravili, aby nedošlo k nebezpečí.</li><li>• Pokud je zástrčka poškozena, v případě jakéhokoli nebezpečí kontaktujte distributora, servisní středisko nebo pracovníka s příslušnými dovednostmi a zkušenostmi.</li><li>• Ujistěte se, že používáte tento produkt podle účelu specifikovaného v tomto návodu. Nepoužívejte příslušenství, které nedoporučuje výrobce.</li></ul>
	<b>Pozor!</b>	<p><b>Představuje potenciální nebezpečnou situaci, pokud se jí nevyhnete, může vést ke zranění osoby.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Operátoři by měli při používání věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti personálu a zařízení.</li><li>• Pokud produkt nefunguje normálně, okamžitě ho přestaňte používat a kontaktujte výrobce nebo prodejce se žádostí o vhodnou opravu.</li><li>• S tímto produktem a souvisejícím příslušenstvím by se mělo zacházet opatrně.</li><li>• Správně zacházejte s balícím vakem tohoto produktu, abyste předešli nehodám, jako je zadušení kojenců, a uchovávejte ho mimo dosah dětí.</li></ul>

## Komponenty


### ◆ SVX-20373-06



1. Diamantová dermabraze
2. Radiofrekvence
3. Ultrazvuk
4. Scrubber
5. Horké a studené kladivo


Hlavní jednotka

Zadní panel

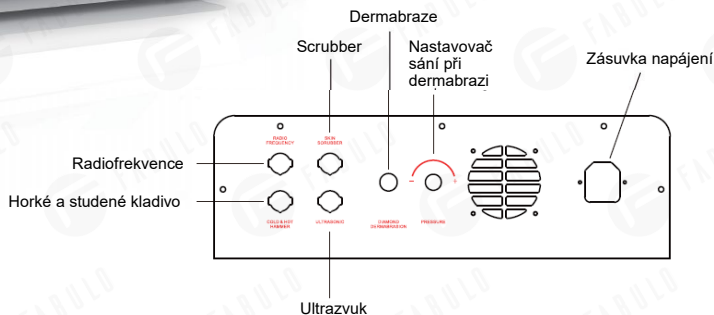

### ◆ Přední panel

1. Horké a studené kladivo
2. Ultrazvuk
3. Scrubber
4. Radiofrekvence
5. Diamantová dermabraze

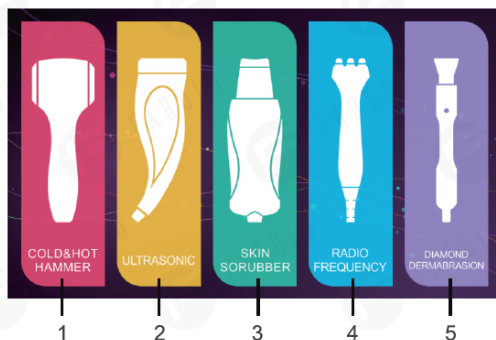

### ◆ Způsob provozu

#### Provozní postup

- ① Kliknutím vyberte požadovanou funkci hlavního rozhraní a vstoupíte do rozhraní příslušné funkce.
- ② Všechna pracovní rozhraní jsou vybavena tlačítkem pro návrat do hlavního rozhraní.

## Parametry produktu

Model produktu	SVX-20373-06
Jmenovité napětí / Frekvence	AC 100-240V, 50/60HZ
Výkon	60W
Čistá hmotnost	6,1kg
Rozměry výrobku	37x31,5x16,5cm
Velikost balení	56,8x52,5x23,5cm
Obsah balení	Hlavní jednotka x 1
	Polička na příslušenství x 1
	Horké a studené kladivo x 1
	Ultrazvuková sonda x 1
	Scrubber x 1
	Radiofrekvence x 1
	Diamantová dermabraze (obsahuje 9 ks) x 1
	Šroubovák x 1
	Šrouby (M4) x 2
	Manuál x 1
Napájecí kabel x 1	

## Komponenty


### ◆ SVX-20374-06



1. Rozprašovač
2. Vakuum
3. Radiofrekvence
4. Ultrazvuk
5. Vysoká frekvence
6. Horké a studené kladivo


Hlavní jednotka

Zadní panel

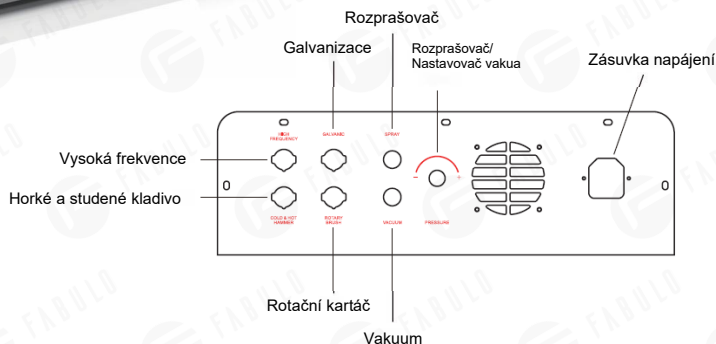

### ◆ Přední panel

1. Horké a studené kladivo
2. Vysoká frekvence
3. Rotační kartáč
4. Galvanizace
5. Rozprašovač / Vakuum

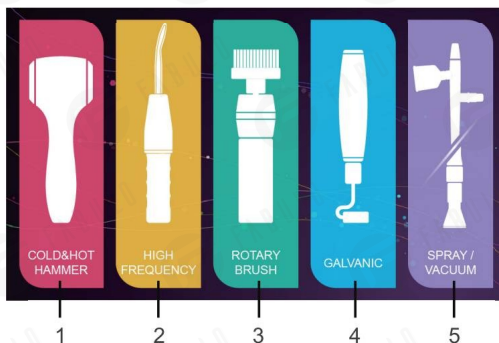

### ◆ Způsob provozu

#### Provozní postup

- ① Kliknutím vyberte požadovanou funkci hlavního rozhraní a vstoupíte do rozhraní příslušné funkce.
- ② Všechna pracovní rozhraní jsou vybavena tlačítkem pro návrat do hlavního rozhraní.

## Parametry produktu

Model produktu	F-364
Jmenovité napětí / Frekvence	AC 100-120V,50/60HZ; AC 220-240V, 50/60Hz
Výkon	60W
Čistá hmotnost	6,3kg
Rozměry výrobku	37x31,5x16,5cm
Velikost balení	56,8x52,5x23,5cm
Obsah balení	Hlavní jednotka x 1
	Polička na příslušenství x 1
	Horké a studené kladivo x 1
	Vysokofrekvenční sonda (obsahuje 4 druhy) x 1
	Rotační kartáč (obsahuje 4 druhy) x 1
	Galvanická sonda x 1
	Vakuum (včetně 3 baněk na odsávání) x 1
	Rozprašovač x 1
	Šroubovák x 1
	Šrouby (M4) x 2
	Manuál x 1
Napájecí kabel x 1	



### Horké a studené kladivo

## Upozornění pro provoz



### Upozornění

- Tato funkce je zakázána pro následující osoby nebo části:
  - ① Pacienty s recidivující jizvou vyvrážkou a alergické pacienti.
  - ② Popáleniny kůže, poleptání, spáleniny od slunce, záněty nebo jiné rány.
  - ③ Lidi trpící imunosupresivními onemocněními s nízkou imunitou nebo užívající imunosupresivní léky.
  - ④ Za poslední 3 měsíce se vyskytla chirurgická místa.
- Kosmetičky nenechávají kladivo v provozu bez dozoru, aby nezpůsobily bezpečnostní nehody.



### Pozor

- Teplé a studené kladivo lze používat pouze v interiéru a je vhodné ho používat v interiéru při teplotě kolem 25°C, protože jeho funkce bude ovlivněna okolní teplotou, jako např. v interiéru, při venkovním použití a příliš vysoké nebo příliš nízké teplotě, nemusí dosáhnout požadované pracovní teploty, a tím nedosáhne očekávaného ošetřujícího účinku.
- Pokaždé, když zapnete kosmetický přístroj a přepnete funkci studené a horké kladivo, musíte před použitím chvíli počkat, dokud studené a horké kladivo nedosáhne přednastavené teploty. Za normálních okolností při startování je doba stoupaní a poklesu teploty asi 5 minut; Při přepínání teplé a studené funkce teplota stoupá a klesá asi 3 minuty.
- Při použití se nesmí blokovat vzduchové štěrby studeného a horkého kladiva, aby se nevytvářely kapky kondenzované vody ve studeném a horkém kladivu a nevedlo to k poruše zkratem.
- Při použití by studené a horké kladivo mělo být blízko u kůže, ošetřovat čelo a přední kost byste měli lehce.
- Když je teplota horkého a studeného kladiva vysoká, nepřestávejte s ním na kůži pohybovat.
- Nepoužívejte horká a studená kladiva jako bicí nástroje.
- Pokud jsou na obou koncích hlavy kladiva škrábance, před použitím ho vyměňte za nové příslušenství.
- Pružinu horkého a studeného kladiva nepřetahujte, dávejte pozor na rozsah použitelné délky.


### Doporučená doba použití

Čas upravte podle specifické situace ošetřovaného místa a pokožky, obecně je doba operace celého obličeje 10-15 minut.





## Horké a studené kladivo

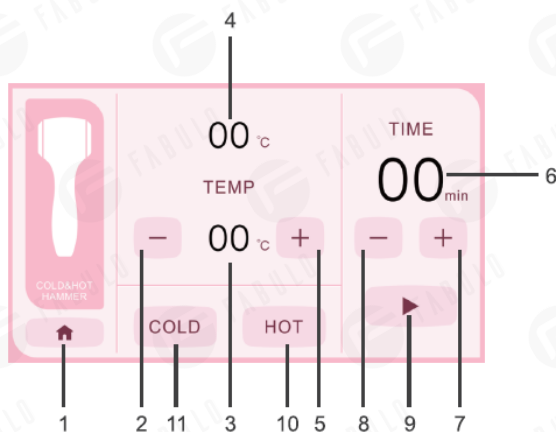

### 1. návrat do hlavního rozhraní

### 2. tlačítko pro snížení teploty

Rozsah teploty chlazení: 5°C ~ 25°C

Rozsah teploty ohřívání: 25°C ~ 45°C

### 3. zobrazení teploty

Když zvolíte režim chlazení, zobrazená teplota je teplota chlazení.

Když zvolíte režim ohřívání, zobrazená teplota je teplota ohřívání.

### 4. aktuální výstupní teplota horkého a studeného kladiva

Při výběru režimu chlazení se zobrazuje aktuální výstupní teplota kladiva. Při výběru režimu ohřívání se zobrazuje aktuální výstupní teplota kladiva.

### 5. tlačítko pro zvýšení teploty

Rozsah teploty chlazení 5°C ~ 25°C

Rozsah teploty ohřevu 25°C ~ 45°C

### 6. zobrazení času

Doba provozu se začne odpočítávat při provozu. Přístroj se automaticky zastaví, když se čas dostane na nulu.

### 7. prodloužení doby provozu

Rozsah doby provozu: 1 ~ 30 minut

### 8. zkrácení doby provozu

Rozsah doby provozu: 1 ~ 30 minut

### 9. spustit/pozastavit

### 10. režim ohřívání

### 11. režim chlazení

## ◆ Způsob provozu

- 1) Vyberte režim chlazení nebo režim ohřívání.
- 2) Nastavte pracovní teplotu a dobu provozu. Maximální čas, který lze nastavit, je 30 minut.
- 3) Vyjměte horké a studené kladivo a zapněte spínač na rukojeti.
- 4) Funkci spustíte stisknutím tlačítka Start.
- 5) Zkontrolujte a potvrďte, zda teplota na displeji odpovídá nastavené teplotě. Pokud ano, dotkněte se ho a zkontrolujte ho svou pokožkou. Pokud již teplotu budete považovat za vhodnou, můžete ho použít přímo, v opačném případě ji znovu upravte.
- 6) Po skončení naplánovaného času se kladivo automaticky zastaví. Vyčistěte ho a položte zpět na policičku s příslušenstvím.



Ultrazvuková sonda (pouze pro kosmetické použití)

### Upozornění pro provoz

#### Upozornění

- Nemiřte sondou přímo na oční bulvu, nedotýkejte se oka ani nemasírujte horní víčko.
- Je zakázána pro následující skupiny osob:
  - ① Těhotné ženy a ženy vybavené srdečním chronometrem.
  - ② Pacienty s nádorem a závažnými srdečními chorobami.
  - ③ Popáleniny kůže, poleptání, spáleniny od slunce, záněty nebo jiné rány.
  - ④ Alergické pacienty a lidi s kontaktní dermatitidou.
- Je zakázáno zapínat sondu bez použití pro kosmetické účely, aby se předešlo riziku opaření vysokou teplotou a snížila se životnost sondy v důsledku přehřátí.
- Neodstraňujte nerezovou sondu a rukojeť sami. Pokud otočíte nerezovou sondu a rukojeť, sonda se může poškodit.
- Tato funkce se nesmí používat pro jiné než kosmetické účely.

#### Pozor

- Před ošetřením je potřeba nanést dostatečné množství krému nebo esence na ošetřující část, aby se zajistilo, že mezi sondou a pokožkou je dobré médium, aby se pokožka příliš nenatahovala.
- Při použití by měla být sonda blízko pokožky, aby se zabránilo kavitaci a poškození kůže.
- Při použití by sonda neměla být ve výstupním stavu bez provozu, v opačném případě může dojít k poškození sondy nebo snížení její životnosti.
- Pokud je sonda příliš horká, popálí pokožku, takže doba použití by neměla přesáhnout 15 minut, u citlivé pokožky by se měla snížit doba používání a energetická náročnost. Prodloužení doby používání nezvyšuje ošetřující účinek a může vést k nebezpečí. Pozornost by se měla věnovat péči o pokožku, doba pobytu na jednom místě by neměla přesáhnout 5 sekund.
- Po kojení se na kůži objeví krátký zánětlivý načervenalý jev, v důsledku vibrací sondy a tvorby tepla, čímž se zvyšuje krevní oběh, což patří k normálnímu stavu.


#### Doporučená doba použití

Čas upravte podle specifické situace ošetřovaného místa a pokožky, obecně je doba operace celého obličeje 10-15 minut.



## Ultrazvuková sonda (pouze pro kosmetické použití)

1. Návrat do hlavního rozhraní
2. Snížení úrovně energie  
Rozsah úrovně energie: 1 ~ 10
3. Zobrazení úrovně energie
4. Zvýšení úrovně energie  
Rozsah úrovně energie: 1 ~ 10
5. Zobrazení doby provozu  
Doba provozu se začne odpočítávat při provozu. Přístroj se vypne automaticky, když se čas dostane na nulu.
6. Prodloužení doby provozu  
Rozsah doby provozu: 1 ~ 30 minut
7. Zkrácení doby provozu  
Rozsah doby provozu 1 ~ 30 minut
8. Spustit/pozastavit
9. Režim nepřetržitě vlny  
Výstupní energie je nepřetržitá.
10. Režim přerušovaných vln  
Výstupní energie je přerušovaná.
11. Režim smíšených vln  
Přepínání režimu kontinuální vlny a režimu smíšených vln.

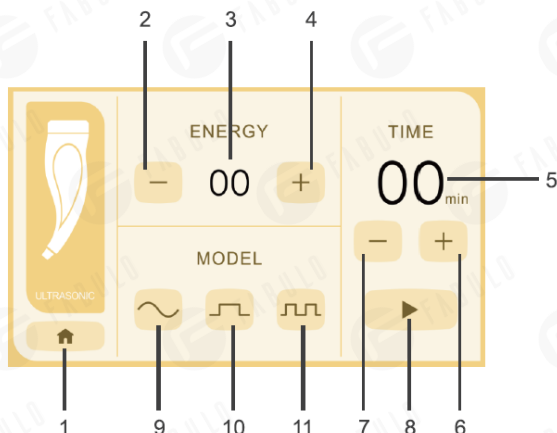

## ◆ Způsob provozu

- 1) Nastavení výstupní úrovně energie a doby provozu. Maximální čas, který lze nastavit, je 30 minut.
  - 2) Vyberte režim výstupní energie.
  - 3) Vyjměte ultrazvukovou rukojeť a zapněte tlačítko Start.
  - 4) Po skončení naplánovaného času se ultrazvuk automaticky zastaví. Vyčistěte kovovou sondu a položte ji zpět na polici příslušenství.
- Po ošetrojící operaci se sonda vydezinfikuje 75% alkoholem a uskladní se řádně v suchu.

Poznámka: Kovovou část sondy nenamáčejte.



Skin Scrubber

### Upozornění pro provoz



#### Upozornění

- Když je hostitel zapnutý, nedotýkejte se samotného výstupního rozhraní Skin Scrubberu.
- Nedávejte Scrubber přímo do kontaktu s očima.
- Je zakázán pro následující lidi:
  - ① Alergické pacienty.
  - ② Popáleniny kůže, poleptání, popáleniny od slunce, záněty nebo jiné rány.
  - ③ Jako jsou srdeční choroby, infekční choroby, neurotičtí pacienti a pacienti s kovem v těle během léčby.
- Nedávejte lopatkovou hlavu fungujícího scrubberu na některé části kůže, abyste předešli poškození kůže.
- Když krém na povrchu pokožky nestačí ke zvlhčení pokožky, včas ho doplňte.
- Při používání scrubberu dávejte pozor na sílu a úhel scrubberu a pokožky.
- Při práci dbejte na propojení příslušenství a hostitele. Netahejte nadměrně, aby přípojovací vodič nevypadl.
- Při práci dávejte pozor, aby přístroj nebyl postříkán vodou nebo jinými korozivními kapalinami.
- Nepoužívejte, pokud byl povrch z nerezavějící oceli zdeformován vadou scrubberu, aby nedošlo ke ztrátě kůže.
- Pokud dojde k jakékoli abnormální situaci, kontaktujte prodejce a požádejte profesionální pracovníky údržby o kontrolu, ráh bez povolení kvůli údržbě neotevírejte.



#### Pozor

- Scrubber udržujte vždy čistý a po každém použití ho dezinfikujte 75% alkoholem.
- Doba setrvání na jednom místě pokožky by neměla přesáhnout 5 sekund.

#### Doporučená doba použití


Obecně je doba celé operace obličeje 15 minut.

- Po ošetrovatelské operaci špachtli a antistatický kryt zápěstí sterilizujte 75% alkoholem a uložte na suché místo.

Kovovou část náramku ESD nenamáčejte.



Skin Scrubber

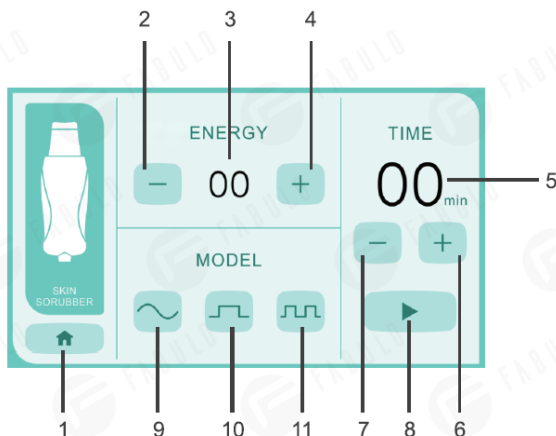

1. návrat do hlavního rozhraní
2. snížení úrovně energie  
Rozsah úrovně energie: 1 ~ 10
3. zobrazení úrovně energie
4. zvýšení úrovně energie  
Rozsah úrovně energie: 1 ~ 10
5. zobrazení času provozu

Doba provozu se začne odpočítávat při provozu.

Přístroj se automaticky zastaví, když se čas dostane na nulu.

6. prodloužení doby provozu  
Rozsah provozního času: 1 ~ 30 minut
7. zkrácení doby provozu  
Rozsah provozního času: 1 ~ 30 minut
8. spustit/pozastavit
9. režim nepřetržitě vlny  
Výstupní energie je nepřetržitá.
10. režim přerušovaných vln  
Výstupní energie je přerušovaná.
11. režim smíšených vln  
Přepínání režimu kontinuální vlny a režimu smíšené vlny.

## ◆ Způsob provozu

1. Nastavte stupeň výkonu a pracovní dobu, nejdelší čas lze nastavit na 30 minut.
2. Vyberte výstupní režim.
3. Vyberte Skin Scrubber a stiskněte tlačítko Start, abyste ho mohli použít.
4. Po skončení používání očistěte a otřete Skin Scrubber a položte ho zpět na polici příslušenství.

Poznámka: přidejte malé množství vody do kovové části Skin Scrubberu.

Když Skin Scrubber funguje, voda se okamžitě odpaří a vytvoří mlhu.



Radiofrekvence

### Upozornění pro provoz



#### Upozornění

- Výrobek použijte při jmenovitém napětí odpovídajícím výrobku a ujistěte se, že zástrčka je zcela zasunuta, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepoužívejte ho v koupelně nebo ve vlhké místnosti, protože může způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.
- Nepoužívejte na místech, kde se maluje, natírá, přivádí kyslík a na jiných hořlavých a výbušných místech.
- Pokud tuto funkci nepoužíváte, stiskněte tlačítko pozastavení.
- Tato funkce by se neměla používat u pacientů s onemocněním srdce, cukrovkou, hypertyroidózou, maligním nádorem, těžkou hypertenzí, implantovaným kovem nebo kardiostimulátorem, epilepsií a rakovinou kůže. Pokud ho používají osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osoby bez zkušeností a znalostí (včetně dětí), musí dohlížet na používání produktu a řídit ho opatrovník a musí být odpovědný za bezpečnost uživatele. Zabraňte dětem manipulovat s výrobkem a zacházet s ním jako s hračkou.
- Těhotné ženy, kojící ženy a ženy s menstruací by ho používat neměly.
- Nepoužívejte na poraněné části a klouby, abyste neovlivnili hojení ran.
- Tato funkce se nesmí používat pro jiné než kosmetické účely.




#### Pozor

- Doporučuje se, aby doba setrvání na jednom místě pokožky nepřesáhla 5 sekund, aby se předešlo opaření.
- Při ošetření se sondou vyhněte oční bulvě a štítné žláze.
- Po ošetřující operaci se sonda vydezinfikuje 75% alkoholem a vhodně uskladní v suchu.
- Tato funkce se nedoporučuje pro oblasti, kde byly vstříknuty umělé výplně, jako je silikonový gel.
- Před použitím této funkce se doporučuje odstranit veškeré kovové příslušenství.



Radiofrekvence

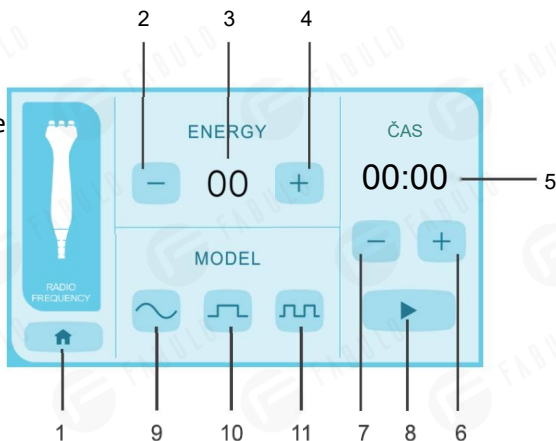

1. Návrat do hlavního rozhraní

2. Snížení úrovně energie

Rozsah úrovně energie: 1 ~ 10

3. Zobrazení úrovně energie

4. Zvýšení úrovně energie

Rozsah úrovně energie: 1 ~ 10

5. Zobrazení doby provozu

Doba provozu se začne odpočítávat při provozu.

Přístroj se automaticky zastaví, když se čas dostane na nulu.

6. Prodloužení doby provozu

Rozsah provozního času: 1 ~ 30 minut

7. Zkrácení doby provozu

Rozsah provozního času: 1 ~ 30 minut

8. Spustit/pozastavit

9. Režim nepřetržité vlny

Výstupní energie je nepřetržitá.

10. Režim přerušovaných vln

Výstupní energie je přerušovaná.

11. Režim smíšených vln

Přepínání režimu kontinuální energie a režimu smíšených vln.

## ◆ Způsob provozu

1) Nastavte stupeň energie a pracovní dobu, nejdelší čas lze nastavit na 30 minut.

2) Vyberte výstupní režim.

3) Vyberte Skin Scrubber a stiskněte tlačítko Start, abyste ho mohli použít.

4) Po skončení používání vyčistěte radiofrekvenční kovovou hlavu a položte ji zpět na polici příslušenství.

## Seznámení se s funkcemi



Dermabrazo

### ◆ Upozornění pro provoz



#### Upozornění

- Tato funkce není použitelná u pacientů s hypertenzí, srdečním onemocněním a cukrovkou.
- Těhotné ženy, kojící ženy a ženy s menstruací by to používat neměly.
- Je zakázáno to používat u pacientů s infekčními chorobami a rakovinou.
- Je zakázáno to používat u lidí, kteří během posledního roku dostali botoxové injekce.
- Lidé s jizvami a nedostatkem kolagenu by tuto funkci neměli používat, aby nedošlo k trvalému poškození kůže.
- Tato funkce se nesmí používat pro jiné než kosmetické účely.
- Zabraňte tomu, aby se děti dostaly do kontaktu s produktem a zacházely s ním jako s hračkou, čímž by se dostaly do nebezpečí.




#### Pozor

- Před ošetřením analyzujte stav pokožky uživatele, a pak vyjměte správnou brusnou hlavu a správné odsávání.
- Před péčí se doporučuje vyčistit pokožku a vysušit tvář od nadměrné vlhkosti.
- Po ošetření očistěte obličej vodou.
- Po ošetřující operaci by měla být brusná hlava dezinfikována 75% alkoholem a skladována správně a v suchu.





Dermabraze

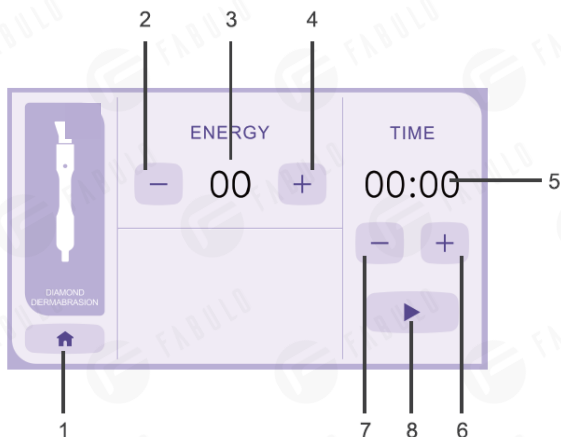

1. Návrat do hlavního rozhraní

2. Snížení úrovně energie

Rozsah úrovně energie: 1 ~ 10

3. Zobrazení úrovně energie

4. Zvýšení úrovně energie

Rozsah úrovně energie: 1 ~ 10

5. Zobrazení doby provozu

Doba provozu se začne odpočítávat při provozu.

Přístroj se automaticky zastaví, když se čas dostane na nulu.

6. Prodloužení doby provozu

Rozsah doby provozu: 1 ~ 30 minut

7. Zkrácení doby provozu

Rozsah doby provozu: 1 ~ 30 minut

8. Spustit/pozastavit

## ◆ Způsob provozu

1) Nastavte stupeň energie a pracovní dobu, nejdelší čas lze nastavit na 30 minut.

2) Vyberte příslušenství a nasadte potřebnou brusnou hlavu.

3) Pokud chcete přístroj začít používat, stiskněte tlačítko Start.

4) Po skončení používání vyčistěte příslušenství a položte ho zpět na polici příslušenství.

## Seznámení se s funkcemi



Rozprašovač



Odsávání

## ◆ Upozornění pro provoz



### Upozornění

- Funkci odsávání nepoužívejte na oči a okolní pokožku.
- Následující osoby mají zakázáno používat funkce odsávání a rozprašování:
  - ① Alergičtí pacienti.
  - ② Popáleniny kůže, poleptání, popáleniny od slunce, záněty nebo jiné rány.



### Pozor

- Pokud při spuštění přístroje nedochází k odsávání, je to normální jev. Chvilí počkejte, než se přístroj vrátí do normálu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda skleněné brčko není prasklé nebo zlomené. V takovém případě by se použití mělo okamžitě zakázat a vyměnit skleněné brčko.
- Skleněné brčko se nemůže použít na stejné části příliš dlouho. Pohybujte odsávacím perem rychle, aby nedošlo k odsátí kůže.
- Nezapojte hubici do sacího konektoru v případě, že se produkty péče o pokožku nasají do vzduchového čerpadla a poškodí se hlavní přístroj.
- Nevytahujte vzduchovod příliš silně, aby nedošlo k poškození.
- Po použití je potřeba vypnout napájení.




\*

Rozprašovač



Odsávání

1. Návrat do hlavního rozhraní
2. Snížení úrovně energie  
Rozsah úrovně energie: 1 ~ 10
3. Zobrazení úrovně energie
4. Zvýšení úrovně energie  
Rozsah úrovně energie: 1 ~10
5. Zobrazení doby provozu  
Doba provozu se začne odpočítávat při provozu.  
Přístroj se automaticky zastaví, když se čas dostane na nulu.
6. Prodloužení doby provozu  
Rozsah doby provozu: 1 ~ 30 minut
7. Zkrácení doby provozu  
Rozsah provozního času: 1 ~ 30 minut
8. Spustit/pozastavit
9. Režim Vakuum
10. Režim Rozprašovač

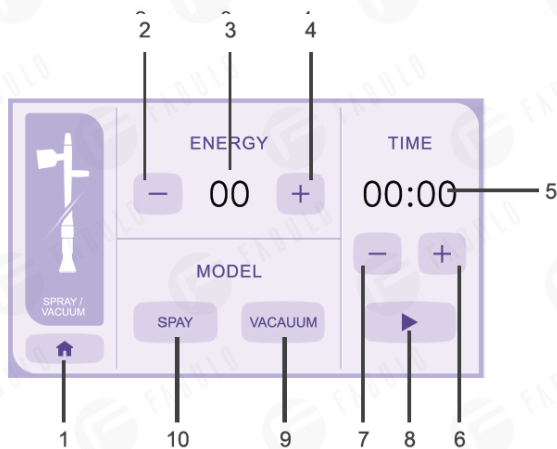

## ◆ Způsob provozu

- 1) Vyberte nástroj na doplňování vody nebo funkci odsávání. Pokud používáte nástroj na doplňování vody, musíte věnovat pozornost tomu, zda je objem vody v lahvi dostatečný.
- 2) Nastavte stupeň energie a pracovní dobu, nejdelší čas lze nastavit na 30 minut.
- 3) Vyberte příslušenství a nasadte potřebnou sací hlavu.
- 4) Pokud chcete přístroj začít používat, stiskněte tlačítko Start.
- 5) Po skončení používání vyčistěte příslušenství a položte ho zpět na polici příslušenství.

Doporučená doba používání

Za normálních okolností by doba nepřetržitého provozu odsávání a rozprašování neměla přesáhnout 10 minut.



### Vysokofrekvenční elektroterapie

## ◆ Upozornění pro provoz



### Upozornění

- Je zakázáno dotýkat se výstupního rozhraní hlavní jednotky kosmetického přístroje vysokofrekvenční elektroterapie nebo výstupního rozhraní rukojeti vysokofrekvenční elektroterapie, když je hlavní přístroj zapnutý.
- Nemiřte trubicí přímo do očí, ani se nedotýkejte v oblasti očí.
- Tento produkt je zakázán pro následující osoby a části:
  - ① Těhotné ženy a ženy vybavené seřizovacími zařízeními (např. kardiostimulátorem).
  - ② Lidi s cévními onemocněními a vysokou citlivostí kůže.
  - ③ Osoby, které mají kovové implantáty nebo kovové zubní protězy vložené do těla.
  - ④ Lidi s poraněními kůže a jinými stavy.
  - ⑤ Části těla s hustými vlasy.
- Nepoužívejte pleťová mléka s obsahem alkoholu, protože alkohol je vysoce hořlavý. Pokud je potřebný toner na bázi alkoholu, aplikujte ho až po použití tohoto produktu.
- Během provozu nechtejte spoj mezi vysokofrekvenční rukojetí a trubicí elektrody rukou, abyste nebyli zasaženi el. proudem.
- Doba působení na jednom místě pokožky by neměla přesáhnout 5 sekund.
- Tato funkce se nesmí používat pro jiné než kosmetické účely.




### Pozor

- Před použitím zkontrolujte, zda elektrodová trubice nebo kovová hlavice na trubicí není uvolněná a zda elektrodová trubice nepraská nebo není poškozená. Pokud ano, nepoužívejte ji a elektrodovou trubicí ihned vyměňte.
- Intenzitu proudu je potřeba postupně snižovat na nulu a před vložením nebo vytažením elektrodové trubice je potřeba vypnout hlavní vypínač.
- Při vkládání nebo vytažování elektrodové trubice si nejdříve nasadte gumové rukavice a elektrodovou trubicí držte palcem a ukazováčkem: trubicí vložte na dno otvoru, dokud nebude vypnutá, a netlačte na trubicí dlaní, abyste zabránili rozbití a vzniku zranění; Je zakázáno ji energicky vytahovat, aby kovová hlavice na elektrodové trubicí nespadla nebo se nezlomila, což by mohlo způsobit zranění.

MUSÍTE si nasadit gumové rukavice, a držet palcem a ukazováčkem, pak pevně zasuňte trubku elektrody.




MUSÍTE si nasadit gumové rukavice, netlačte elektrodovou trubicí dlaní.

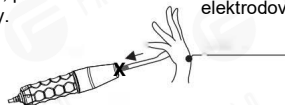

- Při používání vysokonapěťový proudový výstup z elektroterapeutické trubice způsobuje rušení.
- Je zakázáno přibližovat se k hostitelskému přístroji a jiným elektrickým spotřebičům kosmetickým nástrojem vysokofrekvenční elektroterapie. Pokud bude rušit hostitele, může to způsobit, že hostitel nebude fungovat nebo praskne.
- Když je elektrodová trubice méně než 2,5 cm od pokožky, ale není v kontaktu s pokožkou, intenzita proudu by se měla okamžitě snížit, pokud se objeví jiskry, které podráždí pokožku. Pokud zákazník po výše uvedené operaci stále pociťuje jiskření, položte zákazníkovi na obličej malý kousek suchého bavlněného ručníku (nylonové nebo jiné utěrky ze syntetických vláken nejsou povoleny).
- Při použití vždy držte elektrodovou trubicí na pokožce zákazníka. Vysokofrekvenční nepřímé ošetření: při zapínání a vypínání nástroje musí být jedna ruka vždy v kontaktu s pokožkou zákazníka, nikdy to nedělejte bez dotyku pokožky zákazníka. Obě strany cítí proud, a to způsobuje nepohodlí.
- Po použití je potřeba nejdříve vypnout napájení, vytáhnout trubicí elektrody z vysokofrekvenční rukojeti a po dezinfekci a vysušení ji vložit do skříňky na příslušenství.



## Vysokofrekvenční elektroterapie

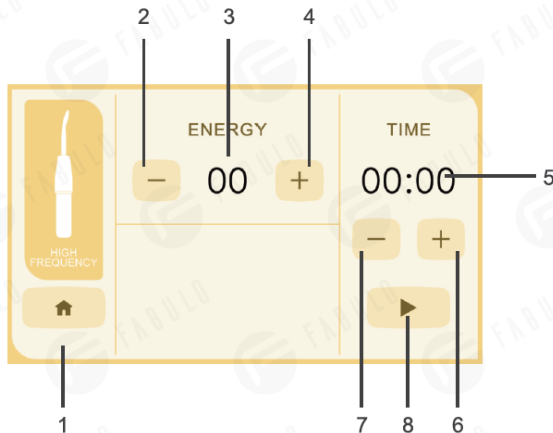

1. Návrat do hlavního rozhraní

2. Snížení úrovně energie

Rozsah úrovně energie: 1 ~ 10

3. Zobrazení úrovně energie

4. Zvýšení úrovně energie

Rozsah úrovně energie: 1 ~ 10

5. Zobrazení doby provozu

Doba provozu se začne odpočítávat při provozu.

Přístroj se automaticky zastaví, když čas bude ukazovat nulu.

6. Prodloužení doby provozu

Rozsah doby provozu: 1 ~ 30 minut

7. Zkrácení doby provozu

Rozsah doby provozu: 1 ~ 30 minut

8. Spustit/pozastavit

## ◆ Způsob provozu

1) Nastavte výstupní stupeň a dobu provozu, nejdelší nastavení může být 30 minut.

2) Vyjměte rukojeť a nainstalujte potřebnou elektroterapeutickou trubici.

3) Funkci spustíte stisknutím tlačítka Start.

4) Po naplánovaném ukončení příslušenství přestane fungovat, vyjměte elektroterapeutickou

trubicí, vyčistěte a otřete sondu vysokofrekvenčního elektroterapeutického příslušenství, a pak ji vložte zpět na polici příslušenství.

Poznámka: Kovové části elektrolyčebné trubice nenamáčejte.

### Doporučená doba použití

Mastná pleť: doporučuje se použít 10-15 minut.

Suchá a dehydrovaná pleť: doporučuje se 3-5 minut.



Rotační kartáč

## ◆ Upozornění pro provoz



### Upozornění

- Nepoužívejte pod očima.
- Následující skupiny mají zakázáno používat funkci kartáče:
  - Alergičtí pacienti.
  - Popáleniny kůže, opaření, spáleniny od slunce, záněty nebo jiné rány.




### Pozor

- Před použitím zkontrolujte, zda je hlavice kartáče pevně zasunuta do rukojeti kartáče.
- Kartáč nepoužívejte, dokud držíte hlavní hlavu kartáče.
- Hlavu kartáče během používání nezapojujte ani nevyjměňte.
- Nepoužívejte ruce ani jiné předměty, abyste kartáč otočili násilím.
- Funkci kartáče nepoužívejte delší dobu, aby nedošlo k přehřátí rukojeti kartáče.
- Před dotykem s pokožkou zákazníka otočte hlavu kartáče dolů. Při dotyku s pokožkou zákazníka by síla měla být mírná, aby zákazníkovi nezpůsobovala nepohodlí.



Rotační kartáč

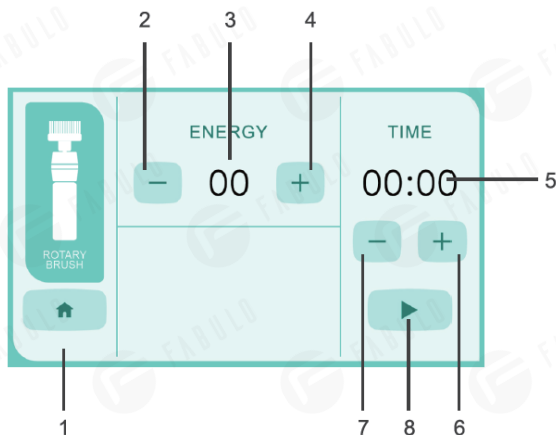

1. Návrat do hlavního rozhraní
2. Snížení úrovně energie  
Rozsah úrovně energie: 1 ~ 10
3. Zobrazení úrovně energie
4. Zvýšení úrovně energie  
Rozsah úrovně energie: 1 ~ 10
5. Zobrazení doby provozu  
Doba provozu se začne odpočítávat při provozu.  
Přístroj se automaticky zastaví, když se čas dostane na nulu.
6. Prodloužení doby provozu  
Rozsah provozního času: 1 ~ 30 minut
7. Zkrácení doby provozu  
Rozsah doby provozu: 1 ~ 30 minut
8. Spustit/pozastavit

## ◆ Způsob provozu

- 1) Nastavte stupeň energie a dobu provozu, nejdelší nastavení může být 30 minut.
- 2) Vyberte příslušenství a nasadte potřebnou sací hlavu.
- 3) Pokud chcete přístroj začít používat, stiskněte tlačítko Start.
- 4) Po skončení používání vyčistěte příslušenství a položte ho zpět na polici příslušenství.

### Doporučená doba používání

Upravte trvání podle specifických podmínek pokožky. Obecně by doba trvání neměla přesáhnout 10 minut.



Galvanická válečková tyč



Galvanická ruční tyč

## ◆ Upozornění pro provoz



### Upozornění

- Nezasahujte válečkem přímo do oční bulvy ani se přímo nedotýkejte oka.
- Je zakázáno používat tento produkt pro následující osoby a části:
  - ① Těhotné ženy a ženy s kovovými předměty v těle.
  - ② Alergické pacienty a pacienty s nádory.
  - ③ Popáleniny kůže, poleptání, spáleniny od slunce, záněty nebo jiné rány.
  - ④ Lidí s rozšířenými kapilárami.
- Je zakázáno používat silně alkalické roztoky, aby se zabránilo negativnímu chemickému poškození.
- Tato funkce se nesmí používat pro jiné než kosmetické účely.



### Pozor

- Kyselost a zásaditost produktů péče o pleť by se měla používat s kladnými a zápornými póly válečku. Když je váleček kladný, přívodní kapalina je kyselá (+); Když je váleček negativní, zaváděná kapalina je alkalická (-), jako například při výběru produktů péče o pleť, které nejsou přímo označeny jako kyselá alkalické, můžete si pořídit testovací papírek ke stanovení pH.
- Při používání se válečku nedotýkejte přímo ruční tyčí. Pokud je kontakt neopatrný, hlavní přístroj aktivuje automatickou ochranu a odpojí výstup.
- Zákazníci s hrubou kůžičkou by si měli nejprve udělat peeling, a pak zaváděný materiál nanést rovnoměrně na místo operace před operací.
- Různé látky (dvě nebo více chemikálií) nemohou být zavedeny spolu nebo postupně na stejné místo, bez ohledu na to, zda mají stejný náboj.
- Za normálních okolností je účinek importu iontů nepřímo úměrný molekulové hmotnosti zaváděné látky, což znamená, že čím větší molekulová hmotnost, tím horší efekt importu a čím menší molekulová hmotnost, tím lepší efekt zavedení.






Galvanická válečková tyč



Galvanická ruční tyč

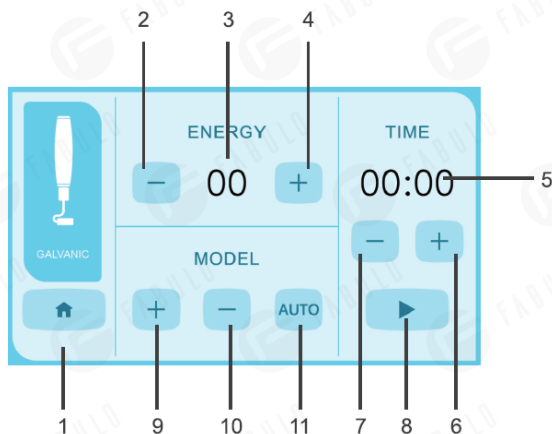

1. Návrat do hlavního rozhraní

2. Snížení úrovně energie

Rozsah úrovně energie: 1 ~ 10

3. Zobrazení úrovně energie

4. Zvýšení úrovně energie

Rozsah úrovně energie: 1 ~ 10

5. Zobrazení doby provozu

Doba provozu se začne odpočítávat při provozu.

Přístroj se automaticky zastaví, když se čas dostane na nulu.

6. Prodloužení doby provozu

Rozsah doby provozu: 1 ~ 30 minut

7. Zkrácení doby provozu

Rozsah doby provozu: 1 ~ 30 minut

8. Spustit/pozastavit

9. Režim kladného mikroproudového výstupu

výstupní kladný mikroproudový signál

10. Režim záporného mikroproudového výstupu

výstupní záporný mikroproudový signál

11. Režim smíšeného výstupu periodicky přepíná mezi kladným a záporným mikroproudovým výstupem.

## ◆ Způsob provozu

1) Nastavte stupeň energie a dobu provozu, nejdelší nastavení může být 30 minut.

2) Vyberte výstupní režim.

3) Vyberte galvanické příslušenství a nechte hosta držet tyčku rukou.

4) Pokud chcete přístroj začít používat, stiskněte tlačítko Start.

5) Po skončení používání příslušenství očistěte a vložte zpět do stojanu na příslušenství.

### Doporučená doba používání

① Trvání penetrační péče: aniontový provoz 2 minuty, pak kationtový provoz 6 minut.

② Trvání péče o odstraňování vodního kamene: aniontový provoz 6 minut a kationtový provoz 2 minuty.

## Seznámení se s funkcemi



Režim RES



Režim CAP



Záporná tabule

## ◆ Upozornění pro provoz



### Upozornění

- Tato funkce není vhodná pro pacienty s hypertenzí, srdečním onemocněním a cukrovkou.
- Nevhodné pro kojící a menstrující ženy.
- Neměli by ho užívat pacienti s infekčními chorobami nebo nádory.
- Funkce by se neměla používat pro jiné než kosmetické účely.
- Zabraňte tomu, aby se děti dostaly do kontaktu s výrobkem a zacházely s ním jako s hračkou, čímž by se dostaly do nebezpečí.
- Během používání by energetická sonda neměla zůstat ve stejné poloze, aby nedošlo k opaření.



### Pozor


- Před ošetřením věnujte pozornost tomu, zda jsou přípojovací kabel, zásuvka napájecího kabelu a sonda zcela zasunuty a nainstalovány.
- Před ošetřením vyjměte vhodný stupeň a sondu.
- Nezástávejte příliš dlouho na jednom místě pokožky, abyste předešli opaření.
- Po ošetřující operaci se sonda vydezinfikuje 75% alkoholem a vhodně uskladní v suchu.
- Příslušný gel nebo esence se musí aplikovat na části těla ke zvlhčení pokožky.
- Umístěte všechny elektrody do úplného kontaktu s pokožkou hosta mírnou silou, abyste předešli brnění pokožky nebo červeným místům způsobeným agregací proudu.
- Zařízení s funkcí identifikace lidské impedance může spustit výstup pouze po dobrém kontaktu.

## ◆ Bezpečnostní opatření při instalaci

- Multifunkční kosmetický přístroj F-365 obsahuje jednu zápornou desku, dvě rukojeti a dvě sondy.
- Rukojeti režimu odporu RES jsou označeny červeným kroužkem a musí být vybaveny pouze sondami z nerezavějící oceli.
- Rukojeť kapacitního režimu CAP s modrým kruhovým logem musí být namontována pouze s černou sondou.
- Kolíčky obou sond mají rozdílné průměry, proto je potřeba správně nainstalovat sondu odpovídající rukojeti. Pokud je sonda nainstalována nesprávně, povede to k tomu, že sonda se nedá nainstalovat nebo je sonda volná a snadno spadne, takže ji nelze spárovat.



## Režim RES

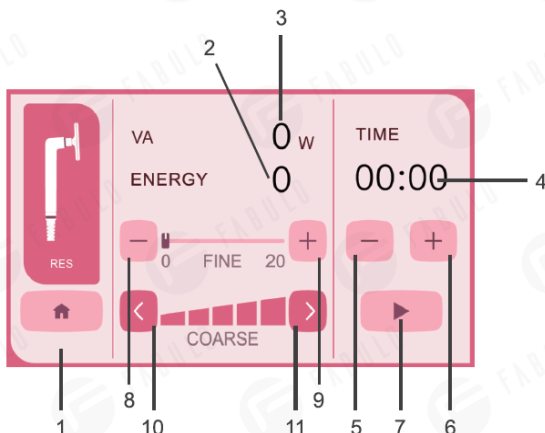

1. Návrat do hlavního rozhraní
2. Zobrazení výkonu v reálném čase rukojeť a záporná deska tvoří smyčku na zobrazení skutečného výstupního výkonu.

3. Zobrazení výstupního rozsahu  
Zobrazuje nastavený rozsah 0 ~ 100

4. Zobrazení doby provozu  
Když se uvede v činnost, začne odpočítávání doby provozu.  
Když se odpočítávání dostane na nulu, zařízení automaticky zastaví výstup.

5. Zkrácení doby provozu  
Rozsah provozního času: 1 ~ 60 minut

6. Prodloužení doby provozu  
Rozsah provozního času: 1 ~ 60 minut

7. Spustit/pozastavit

8. Výstupní stupeň je snížen jemným doladěním  
Nastavitelných 20 stupňů

9. Výstupní stupeň je zvýšen jemným doladěním  
Nastavitelných 20 stupňů

10. Hrubý posun snížen  
Nastavitelných 5 stupňů, každý stupeň lze doladit o 20 stupňů.


11. Hrubý posun zvýšen  
Nastavitelných 5 stupňů, každý stupeň lze doladit o 20 stupňů.

## ◆ Způsob provozu

- 1) Nastavte čas a výstupní převod.
- 2) Odstraňte rukojeť a nainstalujte sondu z nerezavějící oceli.
- 3) Poté, co se host dotkne záporné desky, stisknutím tlačítka Start zapnete funkci.
- 4) Po skončení časování sondy přestanou fungovat, vyjměte sondu, pak ji otřete a vložte rukojeť a sondu zpět na polici příslušenství.



Režim CAP

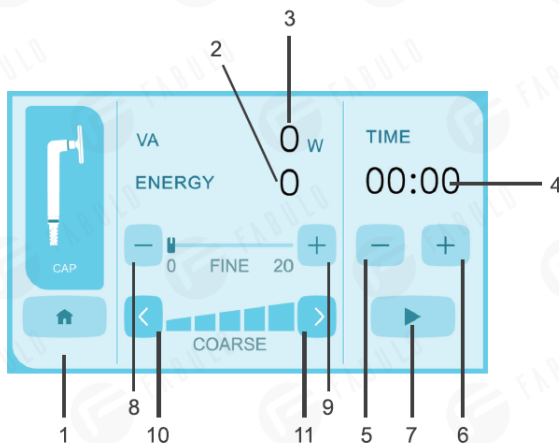

1. Návrat do hlavního rozhraní
2. Zobrazení výkonu v reálném čase  
Rukojeť a záporná deska tvoří smyčku pro zobrazení skutečného výstupního výkonu.

3. Zobrazení výstupního rozsahu  
Zobrazuje nastavený rozsah 0 ~ 100

4. Zobrazení doby provozu  
Když se uvede v činnost, začne odpočítávání doby provozu.  
Když se odpočítávání dostane na nulu, zařízení automaticky zastaví výstup.

5. Zkrácení doby provozu  
Rozsah provozního času: 1 ~ 60 minut

6. Prodloužení doby provozu  
Rozsah provozního času: 1 ~ 60 minut

7. Spustit/pozastavit

8. Výstupní stupeň je snížen jemným doladěním  
Nastavitelných 20 stupňů

9. Výstupní stupeň je zvýšen jemným doladěním  
Nastavitelných 20 stupňů

10. Hrubý posun snížen  
Nastavitelných 5 stupňů, každý stupeň lze doladit o 20 stupňů.

11. Hrubý posun zvýšen  
Nastavitelných 5 stupňů, každý stupeň lze doladit o 20 stupňů.

## ◆ Způsob provozu

- 1) Nastavte čas a výstupní stupeň.
- 2) Odstraňte rukojeť a nainstalujte černou sondu.
- 3) Poté, co se host dotkne záporné desky, stisknutím tlačítka Start zapnete funkci.
- 4) Po skončení časování nástavec přestane fungovat, vyjměte sondu, poté ji otevřete a vložte rukojeť a sondu zpět na polici příslušenství.

Jak se projevuje porucha	Příčina	Řešení
Hlavní přístroj nefunguje nebo vypadává	1. Bez napájení.	1. Zkontrolujte, zda není vypálená pojistka v přihrádce na pojistky v napájecí základně. Pokud dojde k přepálení, vyměňte za novou pojistku s odpovídající specifikací. Stiskněte tlačítko Start, po zapnutí se tlačítko rozsvítí.
	2. Napájecí kabel není správně zasunutý nebo připojený.	2. Správně zapojte nebo připojte napájecí kabel.
Displej nefunguje	1. Bez napájení.	1. Zapněte napájení.
Sonda příslušenství nefunguje	1. Slabý kontakt rozhraní.	1. Odpojte výstupní kabel a poté znovu zapojte zásuvku.
Slabý výstup pro studené a horké kladivo, ultrazvuk, scrubber, RF, galvanizaci a další příslušenství	1. Poloha kohoutku není dobře nastavena. 2. Vysoká teplota příslušenství vede k nízkému výstupnímu výkonu.	1. Nastavte vysoký stupeň polohy. 2. Vhodné použití, nezapínejte na dlouhou dobu. Když příslušenství nepoužíváte, vypněte hlavní vypínač.
Dermabraze má slabé sání	1. Poloha kohoutku není dobře nastavena. 2. Vnitřek dermabraze zablokovan. 3. Zestárnutí vzduchové trubice. 4. Rozhraní mezi vzduchovou trubicí a sacím perem je uvolněno.	1. Nastavte polohu stupně a nastavte vzduchový regulační ventil. 2. Vyměňte příslušenství na dermabrazi. 3. Vyměňte novou vzduchovou hadičku a vložte do rozhraní.
Rozprašovač se slabým rozprašovacím účinkem	1. Poloha kohoutku není dobře nastavena. 2. Zařízení na doplňování vody je uvnitř zablokováno. 3. Stárnutí vzduchové trubice. 4. Rozhraní mezi vzduchovou trubicí a zařízením na doplňování vody je uvolněno. 5. <u>Nedostatek vody v lahvi.</u>	1. Nastavte vysoký stupeň polohy. 2. Vyměňte příslušenství zařízení na doplňování vody. 3. Vyměňte novou vzduchovou hadičku a vložte do rozhraní. 4. Dávejte pozor na obsah vody v lahvi s vodou a vodu dolévejte včas.
Sání pera je slabé	1. Poloha kohoutku není dobře nastavena. 2. Sací hadice pera je zablokována. 3. Stárnutí vzduchové trubice. 4. Rozhraní mezi vzduchovou hadicí a sacím perem je uvolněno.	1. Nastavte vysoký stupeň polohy. 2. Vyměňte nástavec sacího pera. 3. Vyměňte novou vzduchovou hadičku a vložte do rozhraní.
Výkon vysokofrekvenční elektroterapie je slabý	1. Poloha kohoutku není dobře nastavena. 2. Stárnutí po dlouhodobém používání elektroterapeutické tyčinky.	1. Nastavte vysoký stupeň polohy. 2. Vyměňte příslušenství na elektroterapii.
Chvění hostitele	1. Příslušenství je zablokováno.	1. Zkontrolujte, zda není zablokována vzduchová trubice příslušného příslušenství.

Pokud se problém nevyřeší ani po výše uvedených operacích, obraťte se na středisko údržby nebo dodavatele, aby ho vyřešili.



Nevyhazujte stará nebo vadná zařízení do domácího odpadu;  
mělo by se to dělat pouze prostřednictvím veřejných sběrných míst.

▲ Před použitím zkontrolujte specifikaci produktu. Tato příručka slouží pouze jako reference. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.